

CAROLI BODYGUIDE®

INNOVATIVE
SOFTORTHETIK



Inhalt

ALLGEMEIN

Bodyguide® Softorthetik	3
Bodyguide® Technische Merkmale	4

WESTE

Massblatt und Skizzenblatt	6 – 8
Massanleitung	21 – 25

TOP/BODY

Massblatt und Skizzenblatt	10 – 12
Massanleitung	21 – 25

T-SHIRT/BODY

Massblatt und Skizzenblatt	14 – 16
Massanleitung	21 – 25

LANGARM-SHIRT/BODY

Massblatt und Skizzenblatt	18 – 20
Massanleitung	21 – 25

LEGGINS KURZ

Massblatt und Skizzenblatt	28 – 30
Massanleitung	35 – 37

LEGGINS LANG

Massblatt und Skizzenblatt	32 – 34
Massanleitung	35 – 37

JUMPSUIT KURZ

Massblatt und Skizzenblatt	38 – 41
Massanleitung	46 – 49

JUMPSUIT LANG

Massblatt und Skizzenblatt	42 – 45
Massanleitung	46 – 49

ABNEHMBARE ÄRMEL

Massblatt und Skizzenblatt	52 – 54
Massanleitung	55 – 56

HANDSCHUHE

Massblatt und Skizzenblatt	58 – 60
Massanleitung	61 – 63

ARM-SLEEVE

Massblatt und Skizzenblatt	66 – 68
Massanleitung	69 – 70

BEIN-SLEEVE

Massblatt und Skizzenblatt	71 – 73
Massanleitung	74 – 75



BODYGUIDE® Innovative Softorthetik

Die Produkte unserer BODYGUIDE® Serie wurden mit dem Ziel entwickelt, Kindern und Erwachsenen mit neuromotorischen und muskuloskeletalen Defiziten zu helfen und ihre Körperwahrnehmung und Sinnesverarbeitung zu verbessern. Wir produzieren unsere BODYGUIDE® Softorthetik nach Ihren Vorgaben in eigener Fertigung. Hierbei greifen wir auf eine langjährige Erfahrung bei der Herstellung von textilen Rumpforthesen zurück. Farbenfrohe Textilien, unterschiedlichste Verschlusssysteme und individuelle Kundenwünsche werden hierbei berücksichtigt und realisiert. Spezielle Maschinen und geschultes Fachpersonal garantieren bei der Verarbeitung elastischer Materialien eine schnelle Umsetzung und Lieferung.

Wirkungsweise:

Durch die passformgenauen und eng anliegenden BODYGUIDE® Produkte aus elastischen Materialien verbessern sich die Stabilität, Aufrichtung und Haltung des Rumpfes und der angrenzenden Gelenke wie Schulter und Hüfte sowie der Extremitäten, ohne hierbei die Restfunktion und Bewegung des Patienten einzuschränken. Durch den kompressiven Druck auf die oberflächlichen Hautstrukturen wird eine propriozeptive Wirkung erzeugt, die zu einer Verbesserung der Körperwahrnehmung von Bewegungen, der Lage im Raum und der Position einzelner Körperteile zueinander führt. Aufgrund des hohen Tragekomforts, einer sehr guten Atmungsaktivität und einer ausgezeichneten Regulierung des Wärmehaushalts stellen die Produkte der BODYGUIDE® Serie eine optimale Alternative zu herkömmlichen orthetischen Versorgungen dar.



Technische Merkmale:

- Propriozeptive Wirkung zur Verbesserung der Körperwahrnehmung
- Innovative Schnitttechnik
- Vielfältige Farbvarianten und Muster
- Unterschiedliche Verschlussysteme
- Qualitativ hochwertige Materialien
- Optimale Passform
- Öko-Tex zertifizierte Stoffe
- Weste, Shirt, Langarmshirt, Leggins
- inklusive einer Änderung
- inklusive eines Verschlussystems bei den Oberteilen

Indikation:

Die Produkte der BODYGUIDE Serie eignen sich für Kinder und Erwachsene mit neuromotorischen und muskuloskelettalen Defiziten unterschiedlichster Grunderkrankungen wie z. B. ICP, Rett Syndrom, Autismus, Schlaganfall, Down Syndrom oder traumatischen Einflüssen mit folgenden Symptomen:

- Cerebrale Lähmungen
- Muskuläre Hypertonie und Hypotonie
- Bewegungs- und Sinnesverarbeitungsstörungen
- Störungen der Körperwahrnehmung
- Haltungs- und Stabilitätseinschränkungen des Rumpfes, Schulter, Hüfte und Extremitäten



Alle Textilien der BODYGUIDE®- Linie sind bei 30 °C in der Waschmaschine waschbar



Um die Vorspannung zu verringern und somit das Schließen des Reißverschlusses zu erleichtern kann er optional mit Druckköpfen unterlegt werden



Für sicheres Öffnen und Schließen des Reißverschlusses sorgt eine unterlegte Stoffleiste, die den oberen Abschluss des Reißverschlusses umschließt



Je nach Wunsch kann zwischen sportlichem Raglanärmel oder klassisch eingesetztem Ärmel gewählt werden



Säume optional mit Haftband

Es stehen verschiedene Ausführungen als Sonden- und Stomaöffnung zur Auswahl. Zu jeder Ausführung kann eine befestigte oder lose Abdeckung, mit Klettverschluss zum Öffnen, bestellt werden.



Druckknöpfe und Reißverschlüsse in vielen verschiedenen Farben



Flexibel (nur mit elastischer Naht eingefasst)



Leicht verstärkt/stabilisiert mit Abdeckung (mit unelastischem Material verstärkt)



Mit Verstärkungsrahmen (fest)




WESTE

Unsere BODYGUIDE®-Weste zeichnet sich besonders durch eine große Verstellbarkeit in der Höhe und in der Weite aus und ist somit als mitwachsende Versorgung oder auch für eine erste Beurteilung einer Soforthesenversorgung bestens geeignet. In Verbindung mit der neu ins Programm aufgenommenen Rückenverstärkung Backbone haben Sie zusätzlich die Möglichkeit, Einfluss auf die Stabilität und Aufrichtung des Rumpfes zu nehmen. Die Rückenverstärkung aus bruchfestem Thermoplast lässt sich schnell und einfach mit einem Heißluftgebläse an die Körperkonturen anpassen und in der taschenartigen Konstruktion der Weste mittels Klett positionieren und fixieren.

! Bitte nutzen Sie unsere Maßblätter als Kopiervorlage.

Für eine Bestellung bitte jeweils Maßblatt 1 für die Maßangaben sowie Kontaktdaten und Maßblatt 2 für die gewünschte Ausführung ausfüllen.

MASSBLATT 1 WESTE

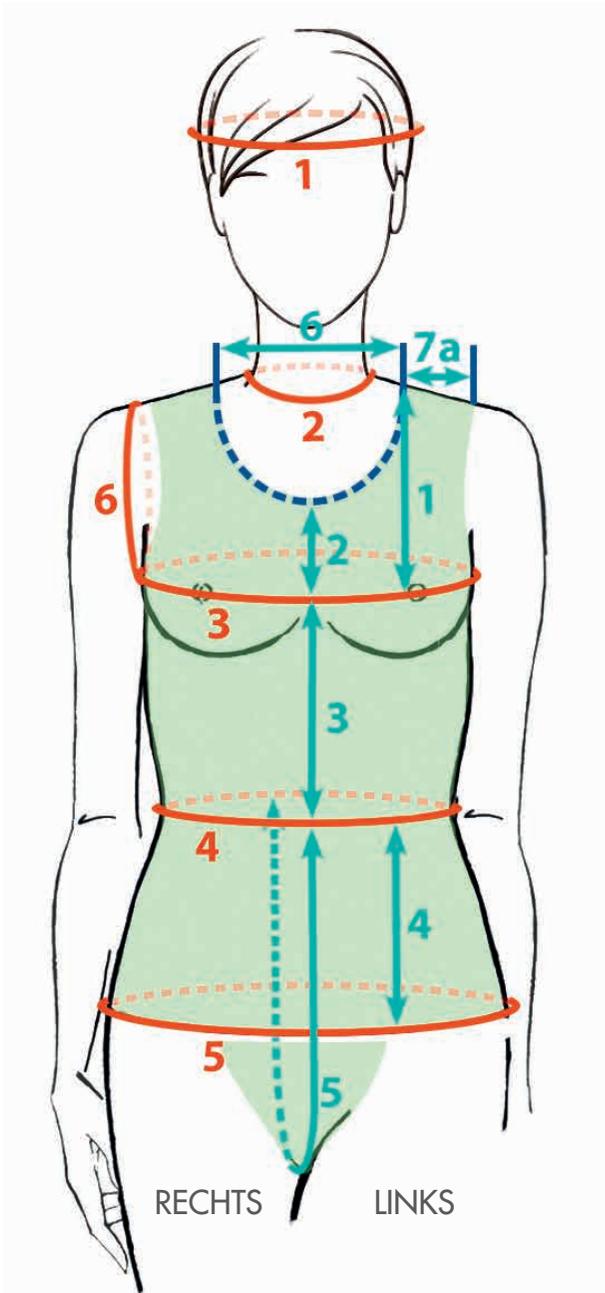

Umfangsmasse

1. **Kopfumfang**.....

2. **Halsumfang**.....

3. **Brustumfang**.....

4. **Taillenumfang**.....

5. **Hüftumfang**.....

5a. Umfang unterer Abschluss.....

Rechts	Links

6. **Vertikaler Schulterumfang**.....

Längenmasse

1. **Brusthöhe (Schulter-Brust)**.....

2. **Halsausschnitt Tiefe**.....

3. **Vorderlänge (Brust-Taille)**.....

4. **Hüfttiefe (Taille-Hüfte)**.....

4a. Länge unterer Abschluss (Taille-Saum).....

5. **Schrittlänge**.....

6. **Halsausschnittbreite**.....

7a. **Trägerbreite**.....

KONTAKTDATEN		<input type="checkbox"/> ANGEBOT	<input type="checkbox"/> BESTELLUNG
Kundennr.:	Kommission:		
Anschrift:	Alter:	<input type="checkbox"/> Männlich	<input type="checkbox"/> Weiblich
	Körpergröße:		
	Diagnose:		
Telefon:	Ansprechpartner:		
Datum:	Unterschrift:		

1. Stoff: (Design bitte ankreuzen)*

2. Ausführung:

- 2-lagig
- 3-lagig
- Vorderteil
- Rückenteil

3. Verschluss: (zusätzlich)

Reißverschluss

- Vorne
- Teilbar Nicht teilbar, lang Nicht teilbar, kurz
- Mit Druckknöpfen unterlegt

Passend zum Design

Kontrastfarbe:

- | | | | | | |
|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Schwarz | <input type="checkbox"/> Weiß | <input type="checkbox"/> Grau | <input type="checkbox"/> Blau | <input type="checkbox"/> Türkis | <input type="checkbox"/> Grün |
| <input type="checkbox"/> Gelb | <input type="checkbox"/> Orange | <input type="checkbox"/> Rot | <input type="checkbox"/> Pink | <input type="checkbox"/> Rosé | |

4. Stomaöffnung Öffnung für Sonde

(Bei der Anprobe genaue Position markieren)

Ausführung Öffnung für Sonde/Stoma

- Flexibel (nur mit Naht eingefasst)
- Leicht verstärkt/stabilisiert
- Mit Verstärkungsrahmen (fest)
- Abdeckung mit Klettverschluss
 - Rechts befestigt Links befestigt Oben befestigt
 - Unten befestigt Lose

5. Zubehör:

- Backbone
- Abnehmbarer Ärmel*
 - Rechts Links

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
*bitte zusätzlich das Maßblatt 1 + 2 „Abnehmbarer Ärmel“ Seite 52 – 53 ausfüllen.

6. Schritzwinkel:

- Klettverschluss vorne
- Druckknöpfe vorne



Black



White



Leaf



Flash




Fire



Metal




Rose

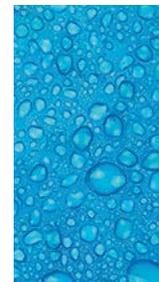

Rain



Zoo

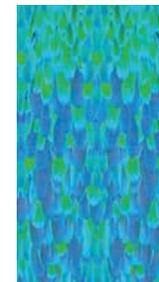

Wings



Wall



Fur



Silver



Kilt



Pirates



Unicorn




Splash Pink



Flowers

* Bei der Weste ist unabhängig vom Design der Rücken immer aus schwarzem Material.

SKIZZENBLATT WESTE

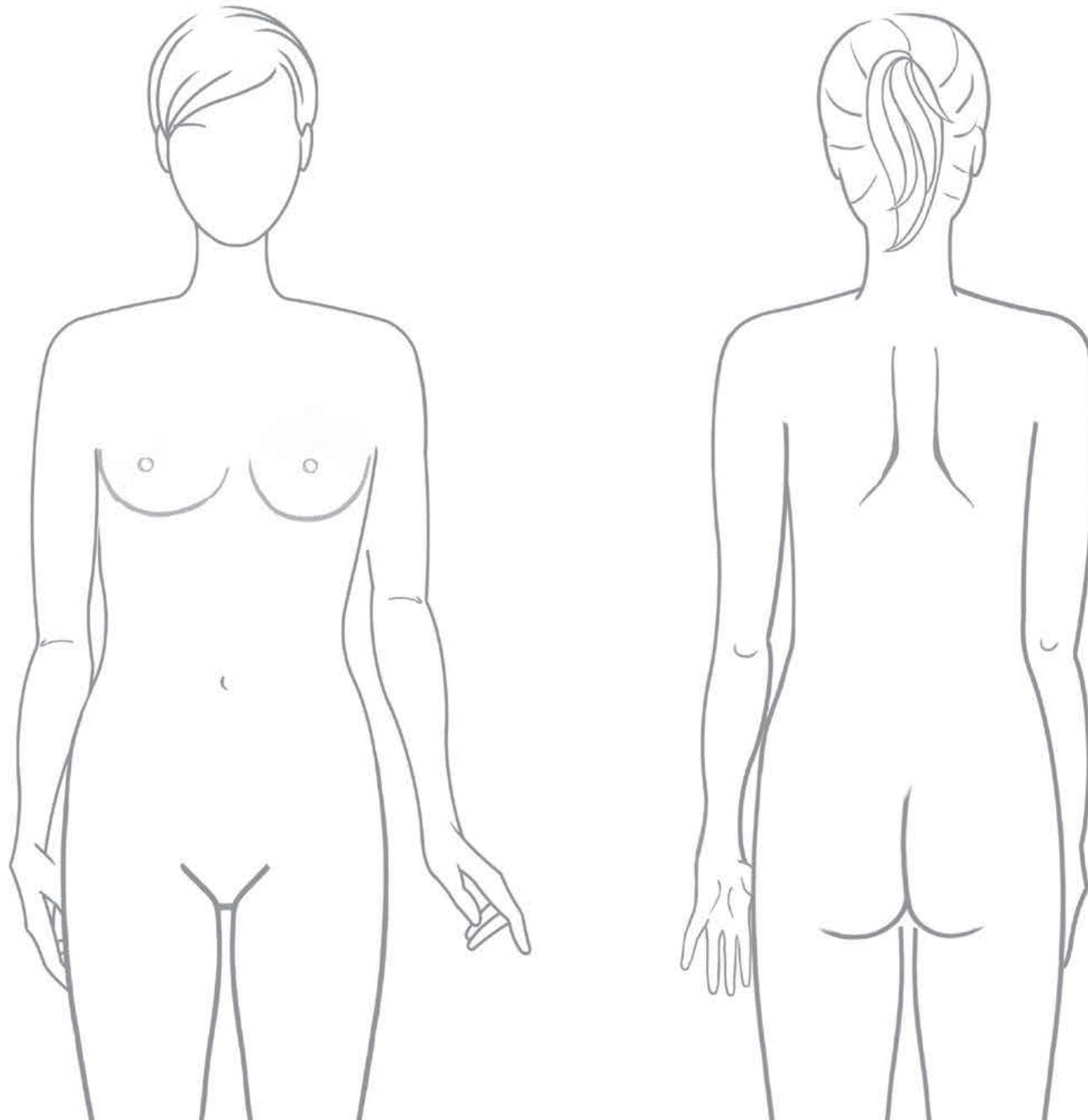

! Bitte nutzen Sie unsere
Skizzenblätter als Kopiervorlage.

Für gewünschte Modifikationen, Korrekturzüge
oder um Haltungen, und -Körper Besonderheiten
zu skizzieren.



TOP/BODY

Das BODYGUIDE®-Top und der ärmellose Body sind für die Versorgung von Wahrnehmungsdefiziten des Rumpfes sowie der Aufrichtung und Stabilisierung geeignet.

Der Grundpreis beinhaltet:

- 1-lagige Ausführung
- 1 Verschlussart (Reißverschluss im Vorder-, oder Rückenteil, Klettverschluss oder Druckknöpfe an der Schulter)
- 1 Änderung nach der Anprobe

Beim Body ist zusätzlich ein vorne zu öffnender Schrittzwickel (Klettverschluss oder Druckknöpfe) inklusive. Die Auslieferung erfolgt zunächst halbfertig.

Optional können gegen Aufpreis folgende Positionen bestellt werden:

- 2- oder 3-lagige Ausführung
- Zusätzliche Verschlüsse
- Haftband am Saum
- Korrekturzüge
- Abnehmbarer Ärmel
- Abnehmbarer Schrittzwickel (beim Top)
- Stoma oder Sondenausschnitt mit oder ohne Abdeckung



Das Top und der ärmellose Body können mit den Leggings kombiniert werden und so die Gesamtkörperwahrnehmung noch weiter verbessern.



! Bitte nutzen Sie unsere Maßblätter als Kopiervorlage.

Für eine Bestellung bitte jeweils Maßblatt 1 für die Maßangaben sowie Kontaktdaten und Maßblatt 2 für die gewünschte Ausführung ausfüllen.

MASSBLATT 1 TOP/BODY

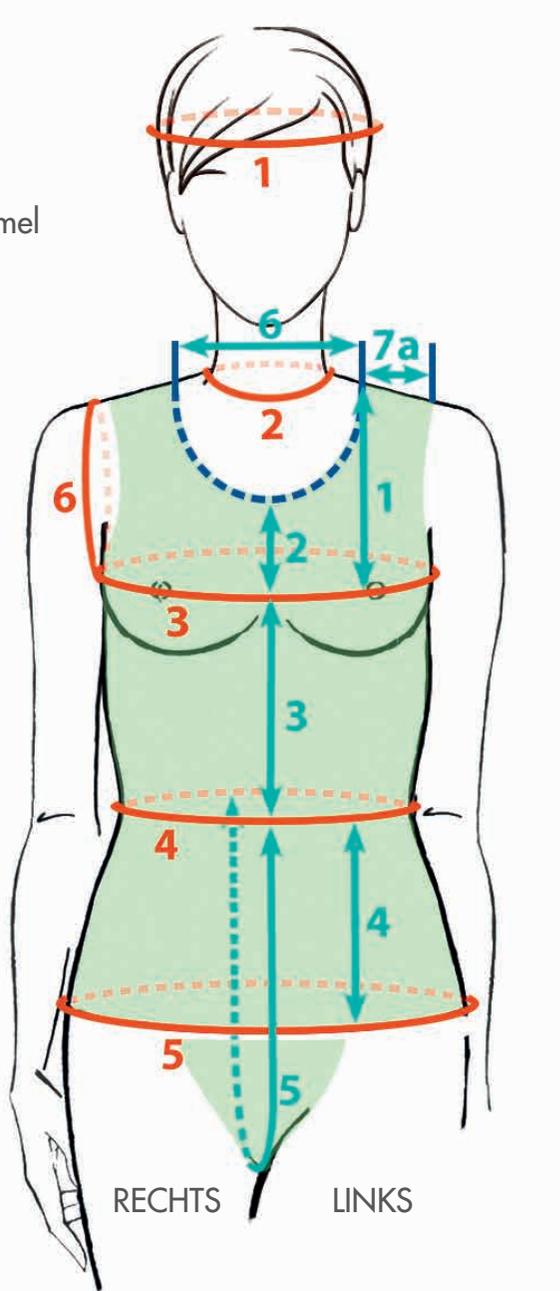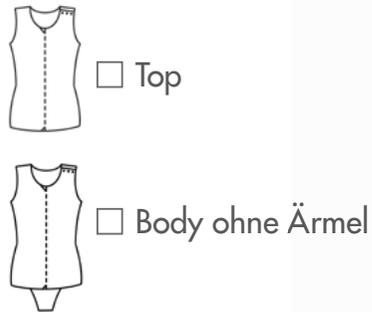

Umfangsmasse

1. **Kopfumfang**

2. **Halsumfang**

3. **Brustumfang**

4. **Taillenumfang**

5. **Hüftumfang**

5a. Umfang unterer Abschluss

Rechts	Links
--------	-------

6. **Vertikaler Schulterumfang**

Längenmaße

1. **Brusttiefe**

2. **Halsausschnitt Tiefe**

3. **Vorderlänge**

4. **Hüfttiefe**

4a. Länge unterer Abschluss

5. **Schrittlänge (bei Body & Schrittzwickel)**

6. **Halsausschnittbreite**

7a. **Trägerbreite**

KONTAKTDATEN		<input type="checkbox"/> ANGEBOT	<input type="checkbox"/> BESTELLUNG
Kundennr.:	Kommission:		
Anschrift:	Alter:	<input type="checkbox"/> Männlich	<input type="checkbox"/> Weiblich
	Körpergröße:		
	Diagnose:		
Telefon:	Ansprechpartner:		
Datum:	Unterschrift:		

1. Stoff: (Design bitte ankreuzen)

2. Ausführung:

- 1-lagig 2-lagig 3-lagig
- Vorderteil
- Rückenteil

3. Haftband:

- Saum

4. Verschluss:

Reißverschluss Rumpf

- Vorne Hinten Rechts Links
- Teilbar Nicht teilbar Lang Kurz
- Mit Druckknöpfen unterlegt

Verschluss Schulter

- Druckknöpfe Klettverschluss Reißverschluss
- Rechts Links

Passend zum Design

Kontrastfarbe:

- Schwarz Weiß Grau Blau Türkis Grün
- Gelb Orange Rot Pink Rosé

5. Stomaöffnung Öffnung für Sonde

(Bei der Anprobe genaue Position markieren)

Ausführung Öffnung für Sonde/Stoma

- Flexibel (nur mit Naht eingefasst)
- Leicht verstärkt/stabilisiert
- Mit Verstärkungsrahmen (fest)
- Abdeckung mit Klettverschluss
 - Rechts befestigt Links befestigt Oben befestigt Unten befestigt
 - Lose


6. Zubehör:

- Abnehmbarer Ärmel*
 - Rechts Links


*bitte zusätzlich das Maßblatt 1 + 2 „Abnehmbarer Ärmel“ Seite 52 – 53 ausfüllen.

7. Schritzwinkel

- Klettverschluss: Vorne Hinten
- Druckknöpfe: Vorne Hinten

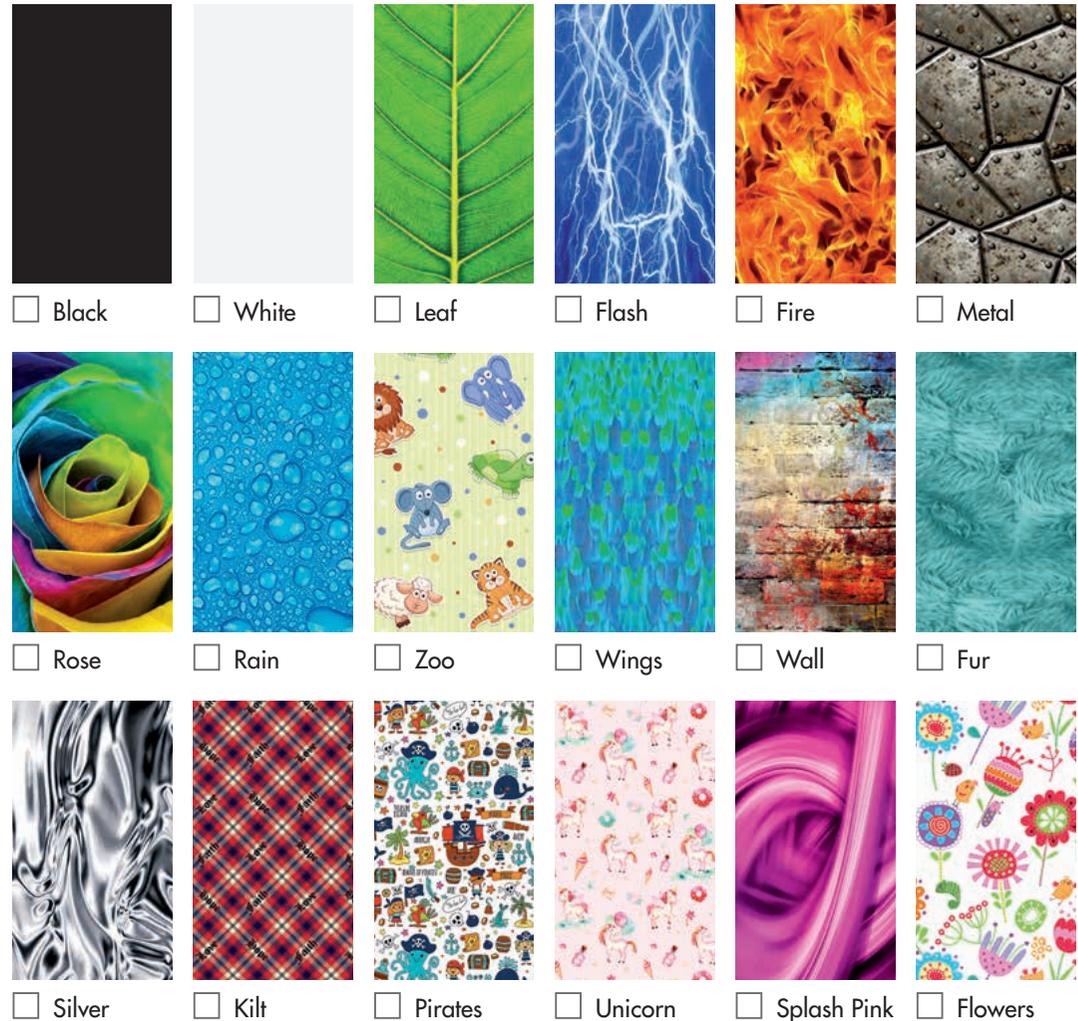


SKIZZENBLATT TOP/BODY

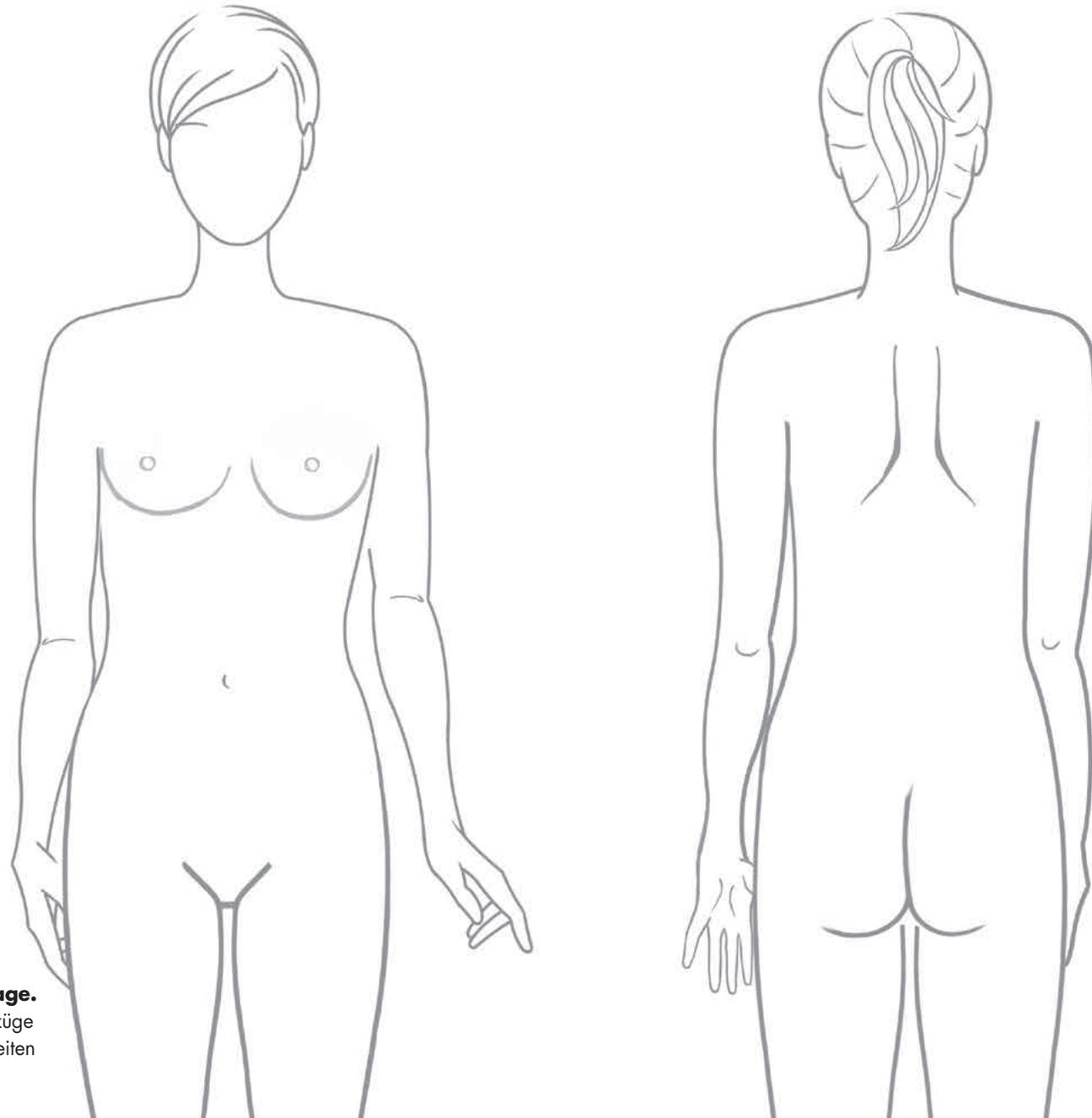

! Bitte nutzen Sie unsere
Skizzenblätter als Kopiervorlage.

Für gewünschte Modifikationen, Korrekturzüge
oder um Haltungen, und -Körper Besonderheiten
zu skizzieren.

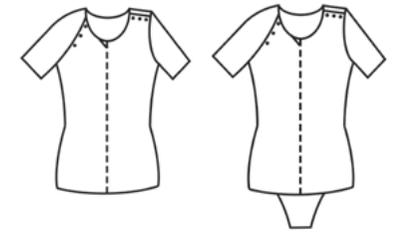

T-SHIRT/BODY

Das BODYGUIDE®-T-Shirt und der Body mit kurzen Ärmeln sind für Wahrnehmungsdefizite im Rumpfbereich sowie der oberen Extremitäten geeignet. Durch die Ärmel bzw. die schulterübergreifende Schnittkonstruktion kann eine bessere Stabilisierung und Aufrichtung des Rumpfes ermöglicht werden. Optional können Haltungskorrekturen durch zusätzliche Lagen oder Korrekturzüge vorgenommen werden.

Der Grundpreis beinhaltet:

- 1-lagige Ausführung (Rumpf und Ärmel)
- 1 Verschlussart (Reißverschluss im Vorder-, oder Rückenteil, Klettverschluss oder Druckknöpfe an der Schulter)
- 1 Änderung nach der Anprobe

Beim Body ist zusätzlich ein vorne zu öffnender Schrittzwickel (Klettverschluss oder Druckknöpfe) inklusive. Die Auslieferung erfolgt zunächst halbfertig.

Optional können gegen Aufpreis folgende Positionen bestellt werden:

- 2- oder 3-lagige Ausführung
- Zusätzliche Verschlüsse
- Haftband am Saum und/ oder an den Ärmeln
- Korrekturzüge
- Abnehmbarer Schrittzwickel (beim T-Shirt)
- Stoma oder Sondenausschnitt mit oder ohne Abdeckung

Das T-Shirt und der Body mit kurzen Ärmeln können mit den Leggings kombiniert werden und so die Gesamtkörperwahrnehmung noch weiter verbessern.

! Bitte nutzen Sie unsere Maßblätter als Kopiervorlage.

Für eine Bestellung bitte jeweils Maßblatt 1 für die Maßangaben sowie Kontaktdaten und Maßblatt 2 für die gewünschte Ausführung ausfüllen.



MASSBLATT 2 T-SHIRT/BODY

1. **Stoff:** (Design bitte ankreuzen)

2. **Ausführung:**

- 1-lagig:
- 2-lagig
- 3-lagig
- Vorderteil Rückenteil Ärmel

3. **Ärmelvariante:**

- Raglanärmel
- Eingesetzter Ärmel

4. **Haftband:**

- Saum
- Ärmel

5. **Verschluss:**

- Reißverschluss Rumpf**
 - Vorne Hinten Rechts Links
 - Teilbar Nicht teilbar Lang Kurz
 - Mit Druckknöpfen unterlegt
- Verschluss Schulter**
 - Druckknöpfe Klettverschluss Reißverschluss
 - Rechts Links
- Passend zum Design
- Kontrastfarbe:

<input type="checkbox"/> Schwarz	<input type="checkbox"/> Weiß	<input type="checkbox"/> Grau	<input type="checkbox"/> Blau	<input type="checkbox"/> Türkis	<input type="checkbox"/> Grün
<input type="checkbox"/> Gelb	<input type="checkbox"/> Orange	<input type="checkbox"/> Rot	<input type="checkbox"/> Pink	<input type="checkbox"/> Rosé	

6. **Stomaöffnung** **Öffnung für Sonde**

(Bei der Anprobe genaue Position markieren)

Ausführung Öffnung für Sonde/Stoma

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
- Flexibel (nur mit Naht eingefasst)
- Leicht verstärkt/stabilisiert
- Mit Verstärkungsrahmen (fest)
- Abdeckung mit Klettverschluss
 - Rechts befestigt Links befestigt
 - Oben befestigt Unten befestigt Lose

7. **Schritzwinkel**

- Klettverschluss: Vorne Hinten
- Druckknöpfe: Vorne Hinten




Black



White



Leaf

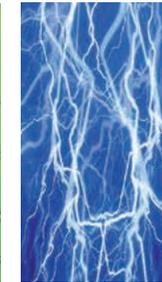

Flash




Fire



Metal




Rose

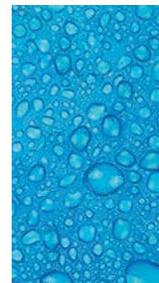

Rain




Zoo

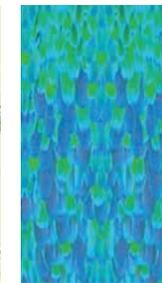

Wings



Wall

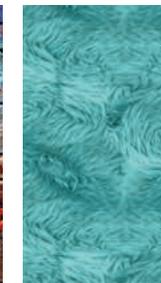

Fur



Silver



Kilt



Pirates



Unicorn




Splash Pink




Flowers

SKIZZENBLATT T-SHIRT/BODY

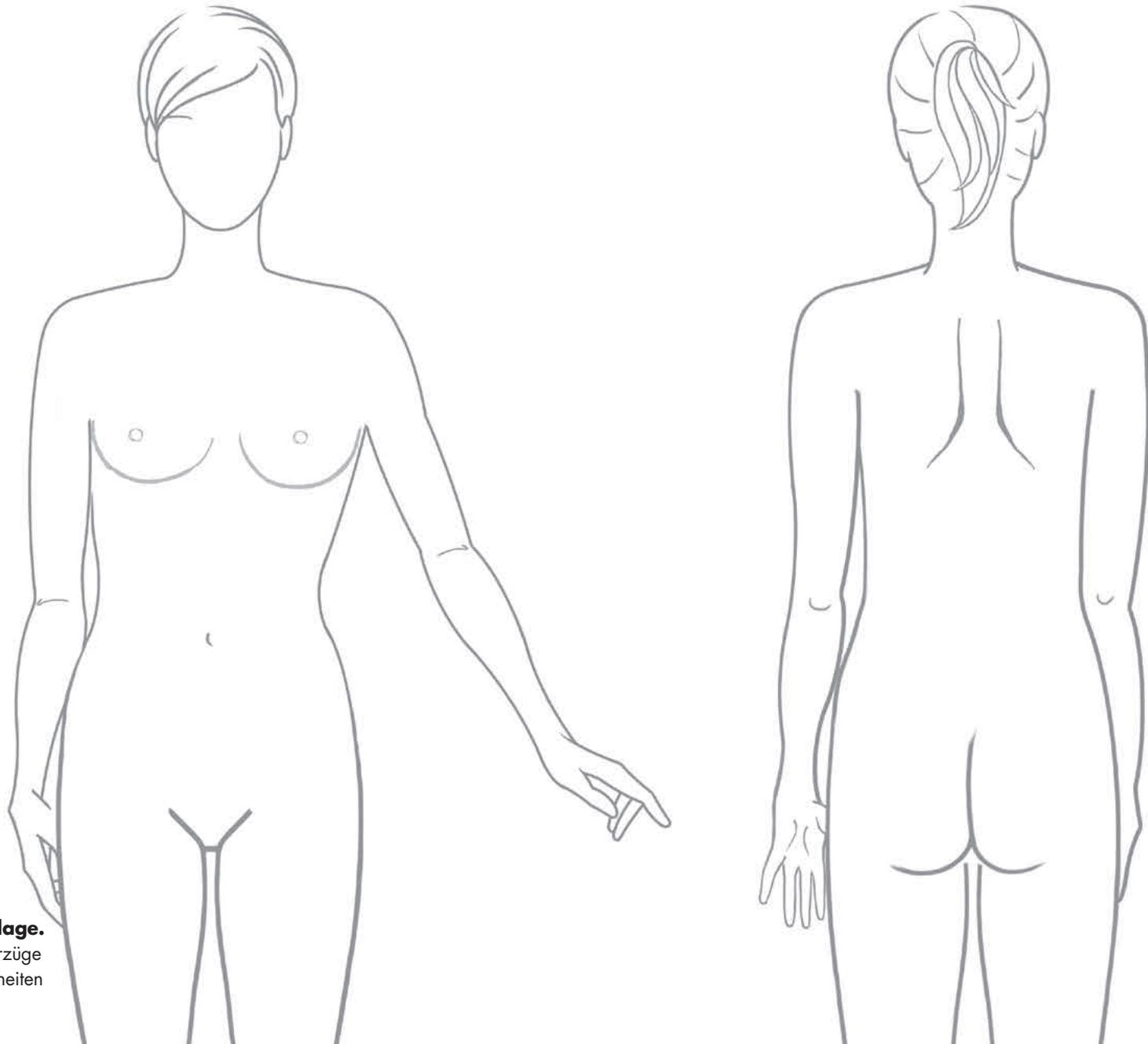

! Bitte nutzen Sie unsere
Skizzenblätter als Kopiervorlage.

Für gewünschte Modifikationen, Korrekturzüge
oder um Haltungen, und -Körper Besonderheiten
zu skizzieren.

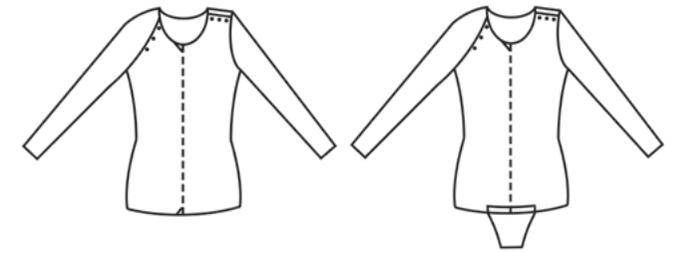

LANGARM-SHIRT/BODY

Das BODYGUIDE®-Langarmshirt und der Body mit langen Ärmeln sind für Wahrnehmungsdefizite im Rumpfbereich sowie der oberen Extremität geeignet. Durch die schulterübergreifende Schnittkonstruktion können eine bessere Stabilisierung und Aufrichtung des Rumpfes ermöglicht werden und durch die bis über das Handgelenk reichende Ärmellänge die Feinmotorik weiterhin unterstützt werden.

Optional können Haltungskorrekturen durch zusätzliche Lagen oder Korrekturzüge vorgenommen werden.

Der Grundpreis beinhaltet:

- 1-lagige Ausführung (Rumpf und Ärmel)
- 1 Verschlussart (Reißverschluss im Vorder-, oder Rückenteil, Klettverschluss oder Druckknöpfe an der Schulter)
- 1 Änderung nach der Anprobe

Beim Body ist zusätzlich ein vorne zu öffnender Schrittzwickel (Klettverschluss oder Druckknöpfe) inklusive. Die Auslieferung erfolgt zunächst halbfertig.

Optional können gegen Aufpreis folgende Positionen bestellt werden:

- 2- oder 3-lagige Ausführung
- Zusätzliche Verschlüsse
- Haftband am Saum und/oder an den Ärmeln
- Korrekturzüge
- Abnehmbarer Schrittzwickel (beim Langarmshirt)
- Stoma oder Sondenausschnitt mit oder ohne Abdeckung

Das Langarmshirt und der Body mit langen Ärmeln können mit den Leggings kombiniert werden und so die Gesamtkörperwahrnehmung noch weiter verbessern.



! Bitte nutzen Sie unsere Maßblätter als Kopiervorlage.

Für eine Bestellung bitte jeweils Maßblatt 1 für die Maßangaben sowie Kontaktdaten und Maßblatt 2 für die gewünschte Ausführung ausfüllen.

MASSBLATT 2 LANGARM-SHIRT/BODY

1. **Stoff:** (Design bitte ankreuzen)

2. **Ausführung:**

- 1-lagig
- 2-lagig
- 3-lagig
- Vorderteil Rückenteil Ärmel

3. **Ärmelvariante:**

- Raglanärmel
- Eingesetzter Ärmel

4. **Haftband:**

- Saum
- Ärmel

5. **Verschluss:**

Reißverschluss Rumpf

- Vorne Hinten Rechts Links
- Teilbar Nicht teilbar Lang Kurz
- Mit Druckknöpfen unterlegt

Verschluss Schulter

- Druckknöpfe Klettverschluss Reißverschluss
- Rechts Links

Passend zum Design

Kontrastfarbe:

- Schwarz Weiß Grau Blau Türkis Grün
- Gelb Orange Rot Pink Rosé

6. **Stomaöffnung** **Öffnung für Sonde**

(Bei der Anprobe genaue Position markieren)

Ausführung Öffnung für Sonde/Stoma

- Flexibel (nur mit Naht eingefasst)
- Leicht verstärkt/stabilisiert
- Mit Verstärkungsrahmen (fest)
- Abdeckung mit Klettverschluss

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
- Rechts befestigt Links befestigt
- Oben befestigt Unten befestigt Lose

7. **Schritzwinkel**

- Klettverschluss: Vorne Hinten
- Druckknöpfe: Vorne Hinten



Black



White



Leaf



Flash




Fire



Metal




Rose

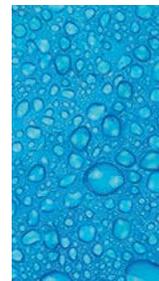

Rain



Zoo

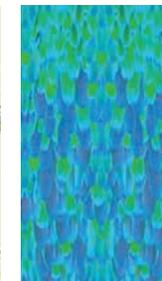

Wings



Wall



Fur



Silver



Kilt



Pirates



Unicorn




Splash Pink



Flowers

SKIZZENBLATT LANGARM-SHIRT/BODY

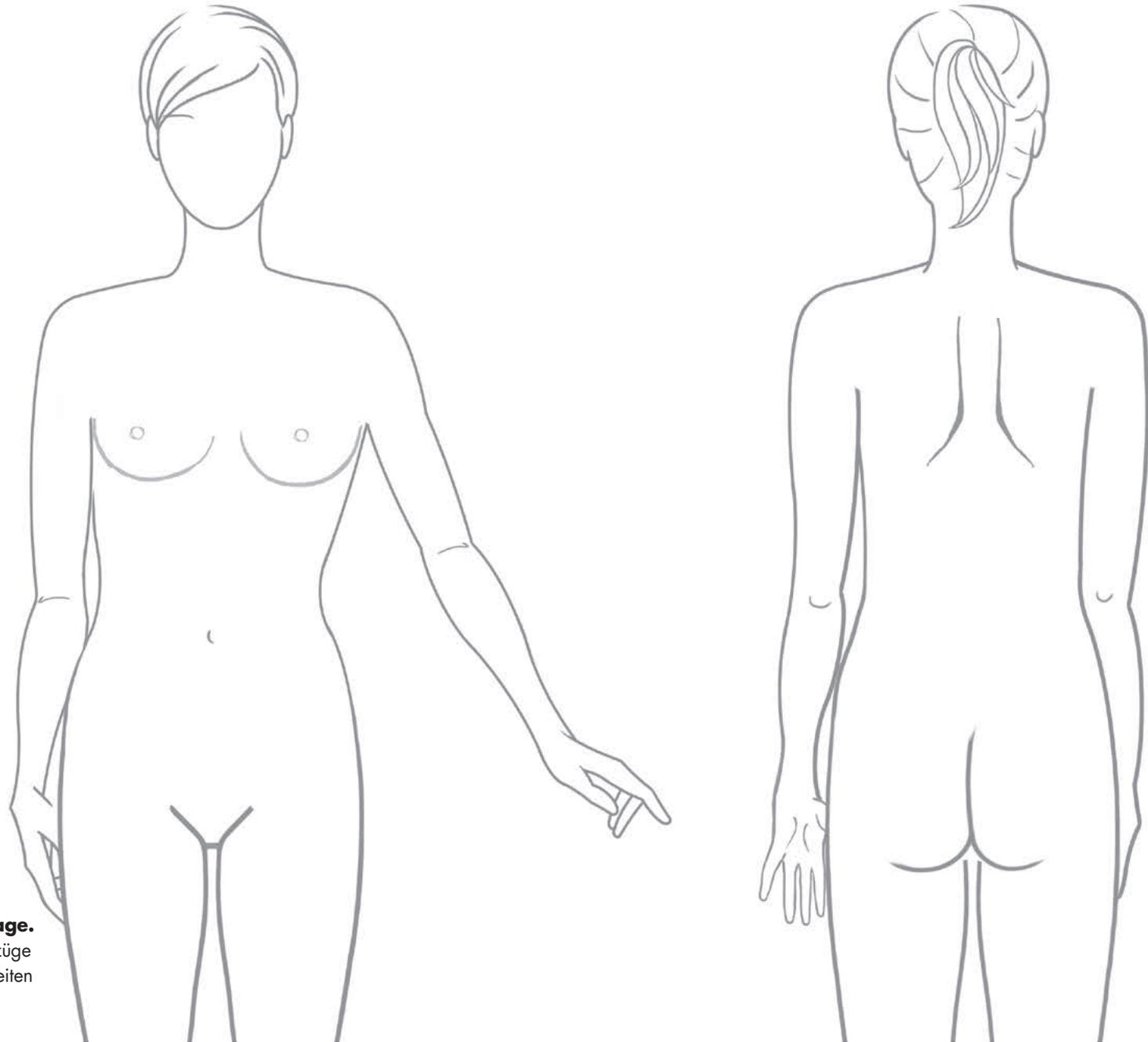

! Bitte nutzen Sie unsere
Skizzenblätter als Kopiervorlage.


Für gewünschte Modifikationen, Korrekturzüge
oder um Haltungen, und -Körper Besonderheiten
zu skizzieren.

MASSANLEITUNG


für **BODYGUIDE**® Weste, Top, Body, T-Shirt und Langarm-Shirt

Um eine gute Passform zu erreichen ist es von Vorteil, über anliegender Unterwäsche zu messen. Alle Maße sollten glatt am Körper, also nicht zu stramm und nicht zu locker gemessen werden. Um genaue Längenmaße zu erreichen ist es sinnvoll, bei allen Umfangsmaßen eine kleine Linie mit einem abwaschbaren Stift auf dem Körper zu markieren.

Die Umfangsmaße sind auf den Maßblättern und in der Anleitung **rot** markiert, die Längenmaße **türkis**. Alle **dunkelblau** markierten Positionen sind Hilfslinien.

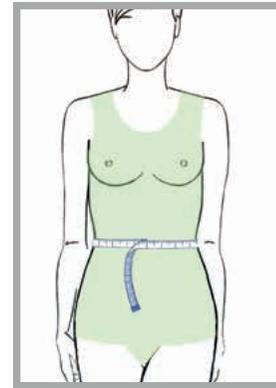


Als erstes sollte die Position der Taillenlinie festgelegt werden, indem man das Taillenmaßband waagrecht zirkulär auf Höhe der stärksten Taillenhöhlung (meistens auf Bauchnabelhöhe) legt und dort belässt.

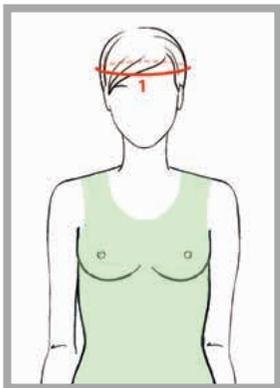


1. Kopfumfang

Hier wird waagrecht über die Stirn und den Hinterkopf auf Höhe des größten Kopfumfanges gemessen.

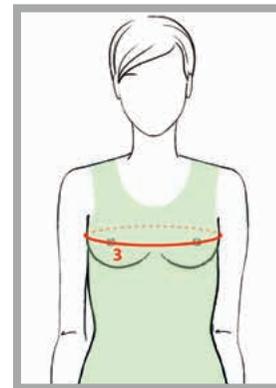


3. Brustumfang

Der Brustumfang wird waagrecht, auf Höhe der stärksten Stelle der Brust bzw. des größten Brustumfangs (üblicherweise auf Höhe der Brustwarzen nach hinten leicht ansteigend gemessen).

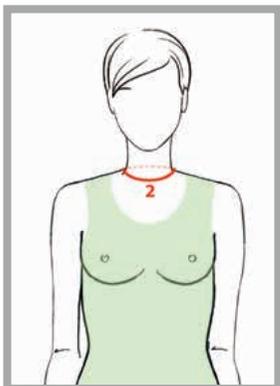


2. Halsumfang

Den Halsumfang misst man waagrecht am Ansatz des Halses.

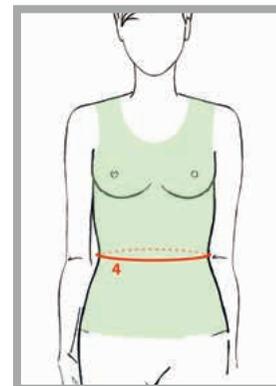


4. Taillenumfang

Der Taillenumfang wird waagrecht, auf Höhe der stärksten Taillenhöhlung, oberhalb des Beckenkamms (meistens auf Bauchnabelhöhe) gemessen.

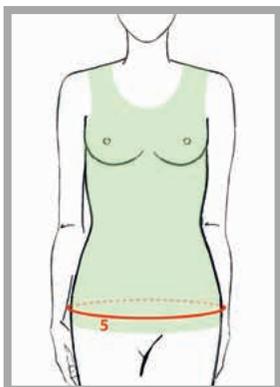


5. Hüftumfang

Hier wird ebenso wie bei Taillen- und Brustumfang, waagrecht gemessen. Die Position des Maßbandes liegt auf der stärksten Stelle des Gesäßes.

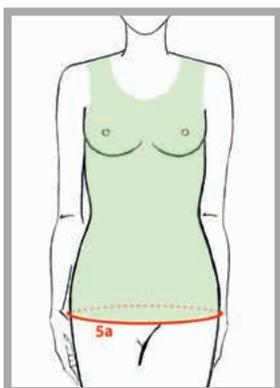


5a. Unterer Abschluß

Der Untere Abschluß muss nur bei Abweichung zum Hüftumfang gemessen werden. Er kann oberhalb oder unterhalb des Hüftumfangs liegen, je nach Länge des Shirts oder der Weste. Es wird auch wieder waagrecht zirkulär gemessen.

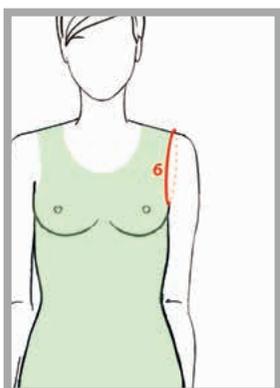


6. Vertikaler Schulterumfang

Hier wird von der Schulter ab, vertikal zirkulär unter dem angelegten Arm durch die Achsel bis wieder zur Schulter hinauf gemessen.

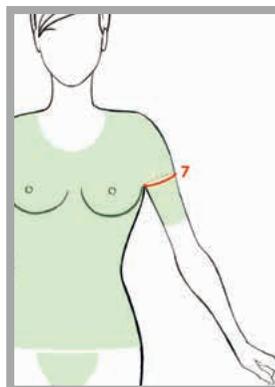


7. Oberarmumfang

Der Umfang des Oberarms wird direkt unter der Achsel hindurch über den Oberarmmuskel gemessen.

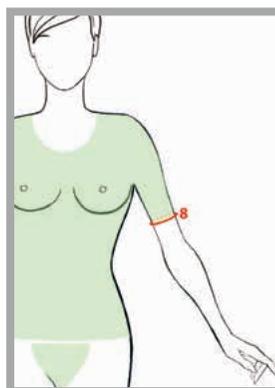


8. Umfang Bizeps / Ärmelabschluß T-Shirt

Auch hier wird auf Höhe des größten Umfangs des Bizeps bzw. beim T-Shirt auf Höhe der gewünschten Ärmellänge gemessen.

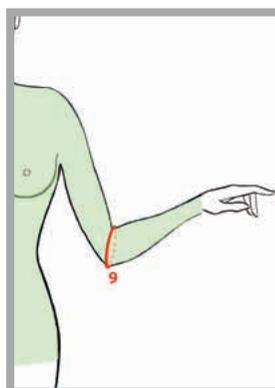


9. Umfang Ellenbogen

Beim Messen des Ellenbogenumfangs sollte der Ober- und Unterarm im rechten Winkel gebeugt werden. Dann wird in der Armbeuge über die stärkste Stelle des Ellenbogens Maß genommen.

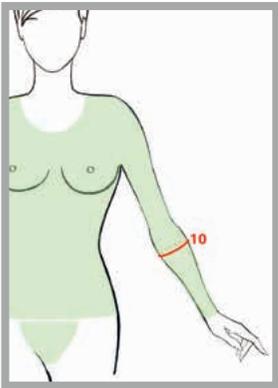


10. Stärkster Unterarm Umfang

Der Umfang des Unterarms wird auf Höhe der stärksten Stelle des Unterarmmuskels gemessen.

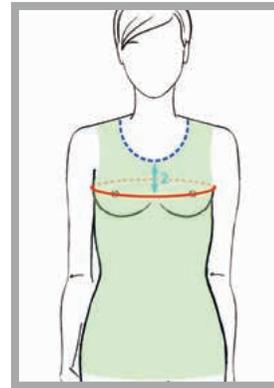


2. Halsausschnitt Tiefe

Dieses Längenmaß ist abhängig von der gewünschten Halsausschnitt Tiefe. Dabei wird von dem zuvor markierten Halsausschnitt vertikal bis zur Brusthöhe (auf Höhe des größten Brustumfangs) gemessen.

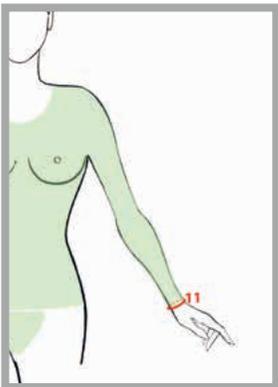


11. Handgelenkumfang

Beim Handgelenkumfang wird über der Handwurzel gemessen.

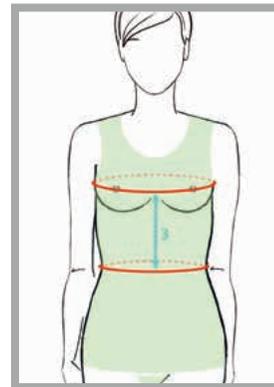


3. Vorderlänge (Brust-Taille)

Hier wird von der Brusthöhe vertikal bis zur Taillenhöhe gemessen.

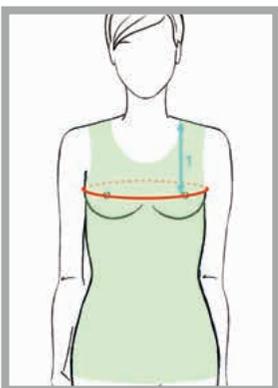


1. Brusthöhe (Schulter-Brust)

Hier wird vertikal, ab der Schultermitte, an der zuvor markierten Ausschnittbreite entlang bis zur Brusthöhe gemessen.

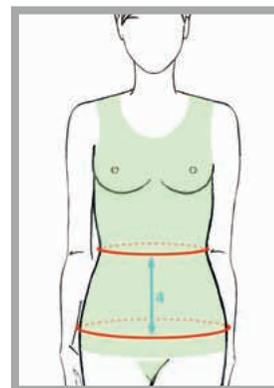


4. Hüfttiefe (Taille-Hüfte)

Die Hüfttiefe wird von der Taillenhöhe ab, vertikal bis zur zuvor markierten Hüftlinie (Höhe stärkster Umfang der Hüfte) gemessen.

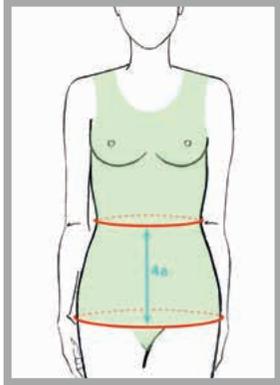


4a. Länge unterer Abschluss / Saum (Taille-Saum)

Dieses Längenmaß wird nur bei Abweichung zur Hüfttiefe (Punkt 4.) benötigt. Das Maß kann je nach gewünschter Länge, kürzer oder länger als (Punkt 4.) sein. Es wird von der Taille ab vertikal bis zur gewünschten Länge gemessen.

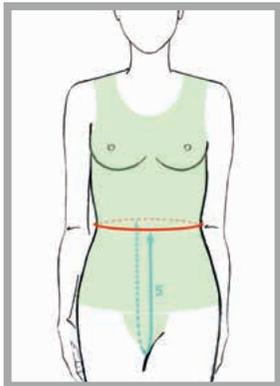


5. Schrittlänge

Dieses Maß wird bei der Weste, bei den Bodys oder wenn ein Schrittzwickel gewünscht ist, benötigt. Hier wird von der vorderen Taillenhöhe (Mitte Taillenmaßband vorne) über den Schritt bis zur hinteren Taillenhöhe (Mitte Taillenmaßband hinten) gemessen.

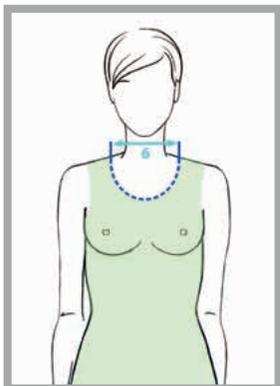


6. Halsausschnittbreite

Zuerst sollte die gewünschte Ausschnittweite mittels Markierungen seitlich vom Hals festgelegt werden. Danach wird waagrecht, halsnah von einer Markierung zur anderen gemessen.

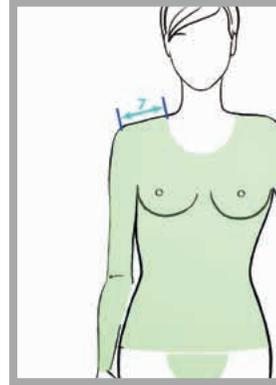


7. Schulterbreite

Dieses Längenmaß wird beim T-Shirt und beim Langarmshirt benötigt. Es wird jeweils rechts und links von der seitlichen Markierung der Halsausschnittbreite zum zuvor markierten jeweiligen Ende des Schulterdachs (Acromion) gemessen.

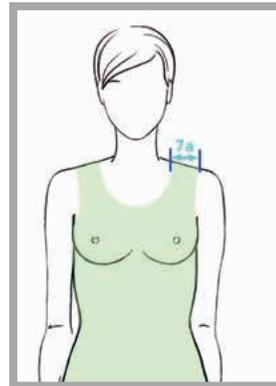


7a. Trägerbreite

Dieses Maß wird bei der Weste, beim Top und beim Body ohne Ärmel benötigt. Hier wird einfach die gewünschte Trägerbreite eingetragen. Die Trägerbreite ist in der Regel ein paar cm schmaler als die Schulterbreite.

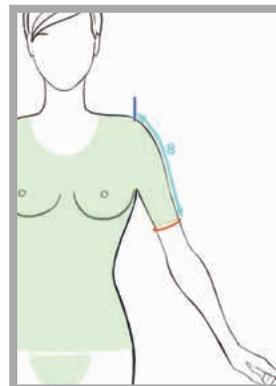


8. Ärmellänge gesamt (T-Shirt)

Dieses Maß wird beim T-Shirt vom zuvor markierten Ende des Schulterdachs, bis zur gewünschten Ärmellänge gemessen.

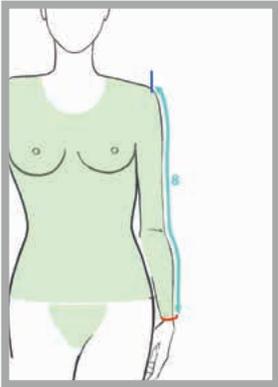


8. Ärmellänge gesamt (Langarmshirt)

Dieses Maß wird beim Langarmshirt zuvor markierten Ende des Schulterdachs bis zum Handgelenk oder der gewünschten Ärmellänge gemessen.

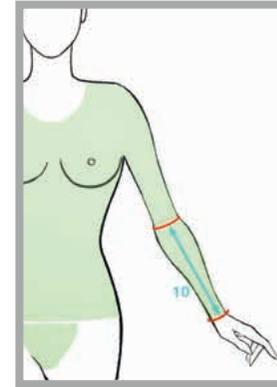


10. Unterarmlänge

Dieses Längenmaß wird nur beim Langarmshirt benötigt. Es wird von der Markierung Ellenbogen Armbeuge bis zum Handgelenk oder der gewünschten Ärmellänge gemessen.

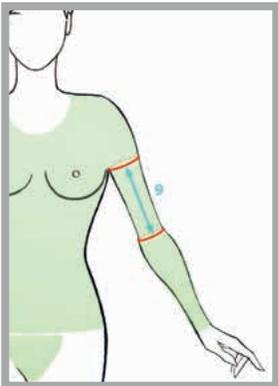


9. Oberarmlänge bis Ellenbogen

Dieses Maß wird nur beim Langarmshirt benötigt. Hier wird vom Armansatz in der Achsel bis zur Markierung Ellenbogen Armbeuge gemessen.

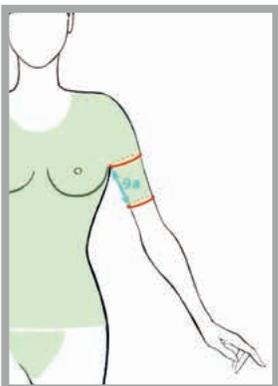

9a. Oberarmlänge bis Ärmelabschluss

Dieses Maß wird nur beim T-Shirt benötigt. Hier wird vom Armansatz in der Achsel bis zur gewünschten Ärmellänge gemessen.

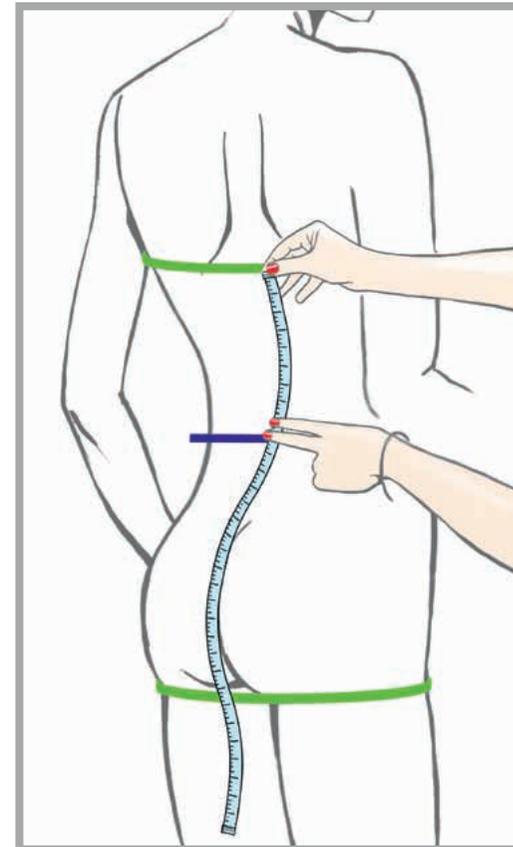


TIPP

Um exakte Höhenmaße zu erhalten, sollte das Maßband immer glatt entlang der Körperform geführt werden.



Der extra breite Bund sorgt für einen hohen Tragekomfort.

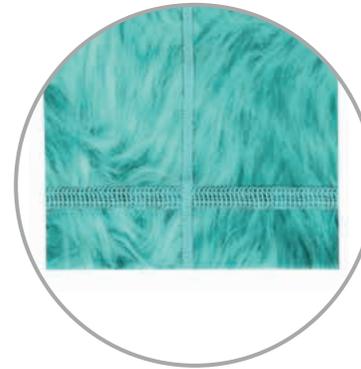

Der genähte, flexible Saum ist strapazierfähig und legt sich glatt am Körper an.



Offener Saum
(Empfohlen für Orthesenträger)




Für leichteres An- und Ausziehen, besonders bei mehrlagiger Versorgung können optional Reißverschlüsse am Beinabschluss und am Bund bestellt werden.





LEGGINS KURZ

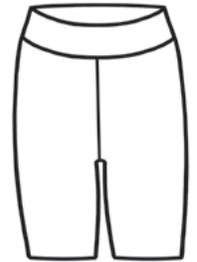

Die BODYGUIDE®-Leggins wirkt Wahrnehmungsdefiziten und Fehlstellungen der Beine und des Hüftbereichs entgegen, unterstützt und stabilisiert. Zusätzlich können Haltungfehler mit speziell abgestimmten Korrekturzügen durch sanften Impuls reguliert werden. Die Leggins können mit allen Oberteilen kombiniert werden und so die Gesamtkörperwahrnehmung noch weiter verbessern.

Die kurze Leggins wird im fertigen Zustand ausgeliefert.

Der Grundpreis beinhaltet:

- 1-lagige Ausführung
- 1 Änderung nach der Anprobe


Optional können gegen Aufpreis folgende Positionen bestellt werden:

- 2-lagige Ausführung
- Reißverschluss vorne und/oder an den Seiten
- Herrenzwinkel
- Öffnung/Aussparung im Schritt
- Haftband am Bund oder den Säumen
- Korrekturzüge
- Offene Säume für Orthesenträger geeignet (ohne Aufpreis)

! Bitte nutzen Sie unsere Maßblätter als Kopiervorlage.

Für eine Bestellung bitte jeweils Maßblatt 1 für die Maßangaben sowie Kontaktdaten und Maßblatt 2 für die gewünschte Ausführung ausfüllen.

MASSBLATT 1 LEGGINS KURZ

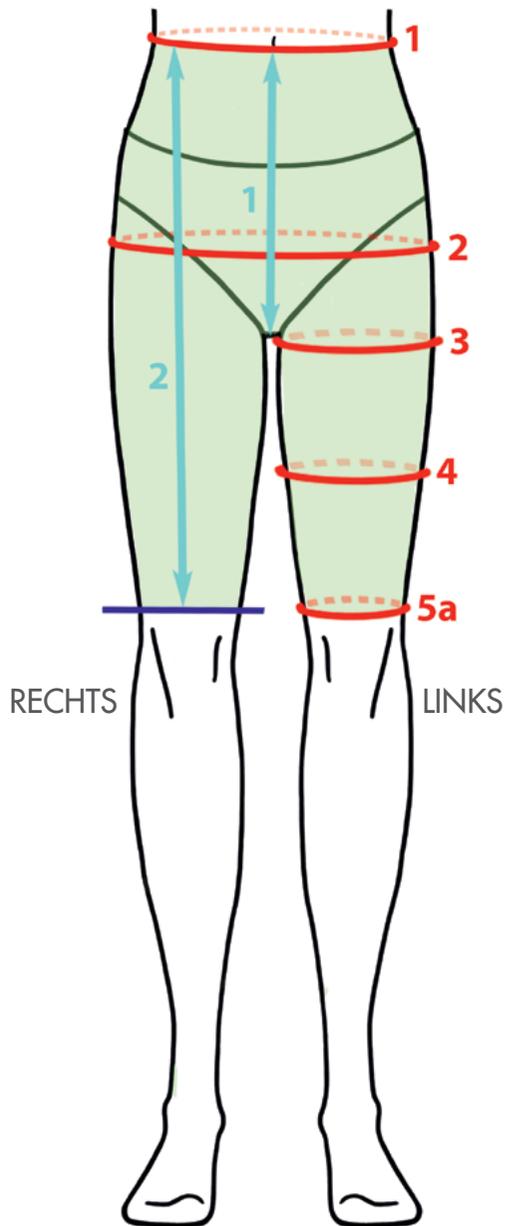

- 1. **Taillenumfang**.....
- 2. **Hüftumfang**.....
- 3. **Oberschenkelumfang unter Pofalte**.....
- 4. **Umfang Mitte Oberschenkel**.....
- 5a. **Umfang unterer Abschluss**.....

Rechts	Links

Umfangsmasse

- 1. **Leibhöhe**
- 2. **Länge**.....

Rechts	Links

Längenmasse

Bundhöhe:

(nur ausfüllen falls Abweichung zu Bund in Taillenhöhe)

- Extra hoher Bund *+.....cm
 - Extra niederer Bund *.....cm
- (*ab Taille messen)

KONTAKTDATEN		<input type="checkbox"/> ANGEBOT	<input type="checkbox"/> BESTELLUNG
Kundennr.:	Kommission:		
Anschrift:	Alter:	<input type="checkbox"/> Männlich	<input type="checkbox"/> Weiblich
	Körpergröße:		
	Diagnose:		
Telefon:	Ansprechpartner:		
Datum:	Unterschrift:		

MASSBLATT 2 LEGGINS KURZ

1. Stoff (Design bitte ankreuzen)

2. Ausführung

- 1-lagig
- 2-lagig

3. Haftband

- Bund
- Saum

4. Öffnung im Schritt



- Reißverschluss Druckknöpfe
- Herrenzwickel Aussparung

Passend zum Design

Kontrastfarbe:

- Schwarz
- Weiß
- Grau
- Blau
- Türkis
- Grün
- Gelb
- Orange
- Rot
- Pink
- Rosé

5. Reißverschluss Mit Druckknöpfen unterlegt

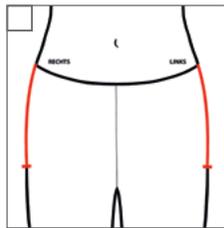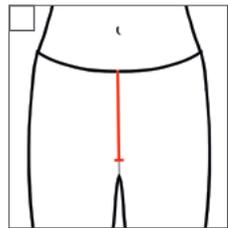

Rechts Links

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
Passend zum Design

Kontrastfarbe:

- Schwarz
- Weiß
- Grau
- Blau
- Türkis
- Grün
- Gelb
- Orange
- Rot
- Pink
- Rosé



Black



White



Leaf



Flash




Fire



Metal




Rose

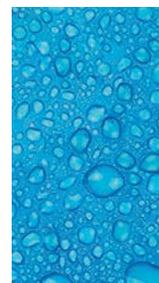

Rain



Zoo

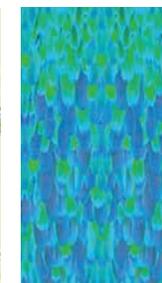

Wings



Wall



Fur



Silver



Kilt



Pirates



Unicorn




Splash Pink



Flowers

SKIZZENBLATT LEGGINS KURZ

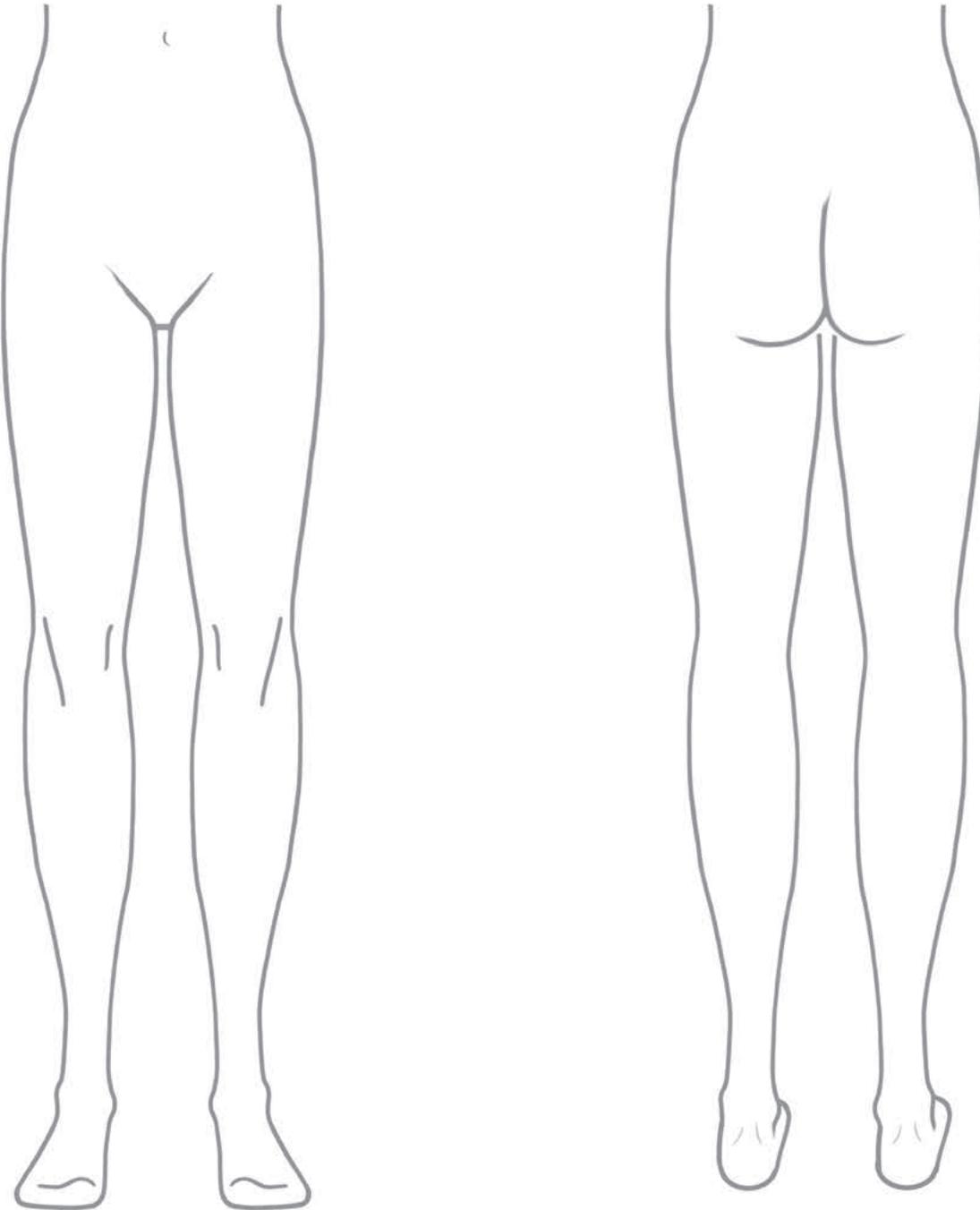

! Bitte nutzen Sie unsere
Skizzenblätter als Kopiervorlage.

Für gewünschte Modifikationen, Korrekturzüge
oder um Haltungs- und -Körper Besonderheiten
zu skizzieren.



LEGGINS LANG

Die BODYGUIDE®-Leggins wirkt Wahrnehmungsdefiziten und Fehlstellungen der Beine und des Hüftbereichs entgegen, unterstützt und stabilisiert. Zusätzlich können Haltungsfelder mit speziell abgestimmten Korrekturzügen durch sanften Impuls reguliert werden. Die Leggins können mit allen Oberteilen kombiniert werden und so die Gesamtkörperwahrnehmung noch weiter verbessern.

Die lange Leggins wird im fertigen Zustand ausgeliefert.

Der Grundpreis beinhaltet:

- 1-lagige Ausführung
- 1 Änderung nach der Anprobe

Optional können gegen Aufpreis folgende Positionen bestellt werden:


- 2-lagige Ausführung
- Reißverschluss vorne und/oder an den Seiten sowie an den Säumen
- Herrenzwinkel
- Öffnung/Aussparung im Schritt
- Haftband am Bund und/oder den Säumen
- Korrekturzüge
- Offene Säume für Orthesenträger geeignet (ohne Aufpreis)



! Bitte nutzen Sie unsere Maßblätter als Kopiervorlage.

Für eine Bestellung bitte jeweils Maßblatt 1 für die Maßangaben sowie Kontaktdaten und Maßblatt 2 für die gewünschte Ausführung ausfüllen.

MASSBLATT 1 LEGGINS LANG

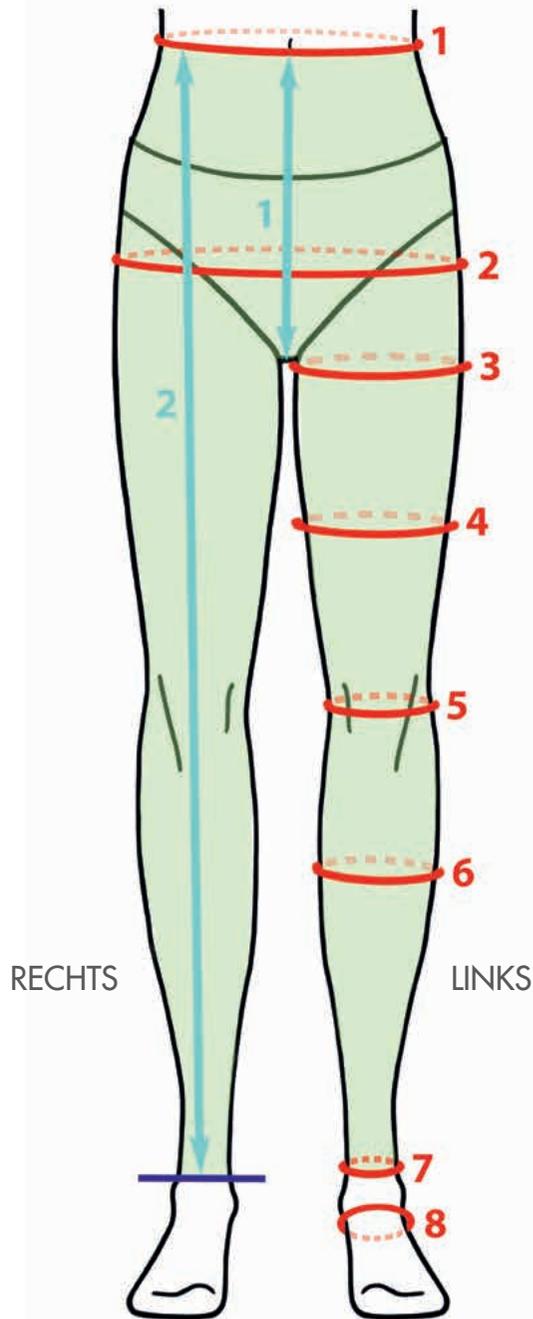

1. Taillenumfang.....

2. Hüftumfang.....

3. Oberschenkelumfang unter Pofalte.....

4. Umfang Mitte Oberschenkel.....

5. Knieumfang.....

6. Umfang stärkste Stelle Wade.....

7. Fesselumfang.....

8. Rist (Fersenumfang).....

		Umfangsmäße
Rechts	Links	

1. Leibhöhe.....

2. Länge.....

		Längenmaße
Rechts	Links	

Bundhöhe:
 (nur ausfüllen falls Abweichung zu Bund in Taillenhöhe)

Extra hoher Bund * \ddaggercm

Extra niederer Bund * $\ddot{=}$cm
 (*ab Taille messen)

KONTAKTDATEN		<input type="checkbox"/> ANGEBOT	<input type="checkbox"/> BESTELLUNG
Kundennr.:	Kommission:		
Anschrift:	Alter:	<input type="checkbox"/> Männlich	<input type="checkbox"/> Weiblich
	Körpergröße:		
	Diagnose:		
Telefon:	Ansprechpartner:		
Datum:	Unterschrift:		

MASSBLATT 2 LEGGINS LANG

1. Stoff (Design bitte ankreuzen)

2. Ausführung

- 1-lagig
- 2-lagig

3. Haftband

- Bund
- Saum

4. Saum offen

(Empfohlen für Orthesenträger)



- Rechts
- Links

5. Öffnung im Schritt


- Reißverschluss
- Druckknöpfe
- Herrenzwickel
- Aussparung
- Passend zum Design
- Kontrastfarbe:

- | | | | | | |
|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Schwarz | <input type="checkbox"/> Weiß | <input type="checkbox"/> Grau | <input type="checkbox"/> Blau | <input type="checkbox"/> Türkis | <input type="checkbox"/> Grün |
| <input type="checkbox"/> Gelb | <input type="checkbox"/> Orange | <input type="checkbox"/> Rot | <input type="checkbox"/> Pink | <input type="checkbox"/> Rosé | |

6. Reißverschluss mit Druckknöpfen unterlegt

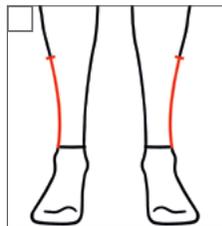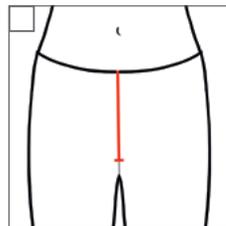

Rechts Links

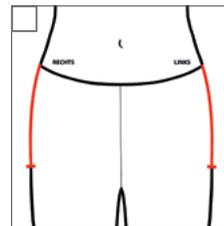


Rechts Links

- Passend zum Design
- Kontrastfarbe:

- | | | | | | |
|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Schwarz | <input type="checkbox"/> Weiß | <input type="checkbox"/> Grau | <input type="checkbox"/> Blau | <input type="checkbox"/> Türkis | <input type="checkbox"/> Grün |
| <input type="checkbox"/> Gelb | <input type="checkbox"/> Orange | <input type="checkbox"/> Rot | <input type="checkbox"/> Pink | <input type="checkbox"/> Rosé | |



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Black



White



Leaf



Flash




Fire



Metal




Rose

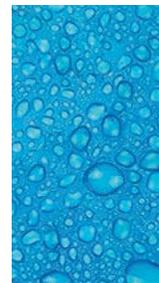

Rain




Zoo

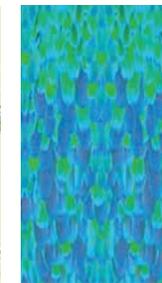

Wings



Wall

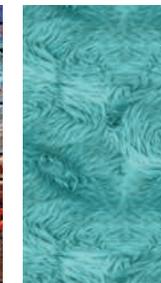

Fur



Silver



Kilt



Pirates



Unicorn




Splash Pink



Flowers

SKIZZENBLATT LEGGINS LANG

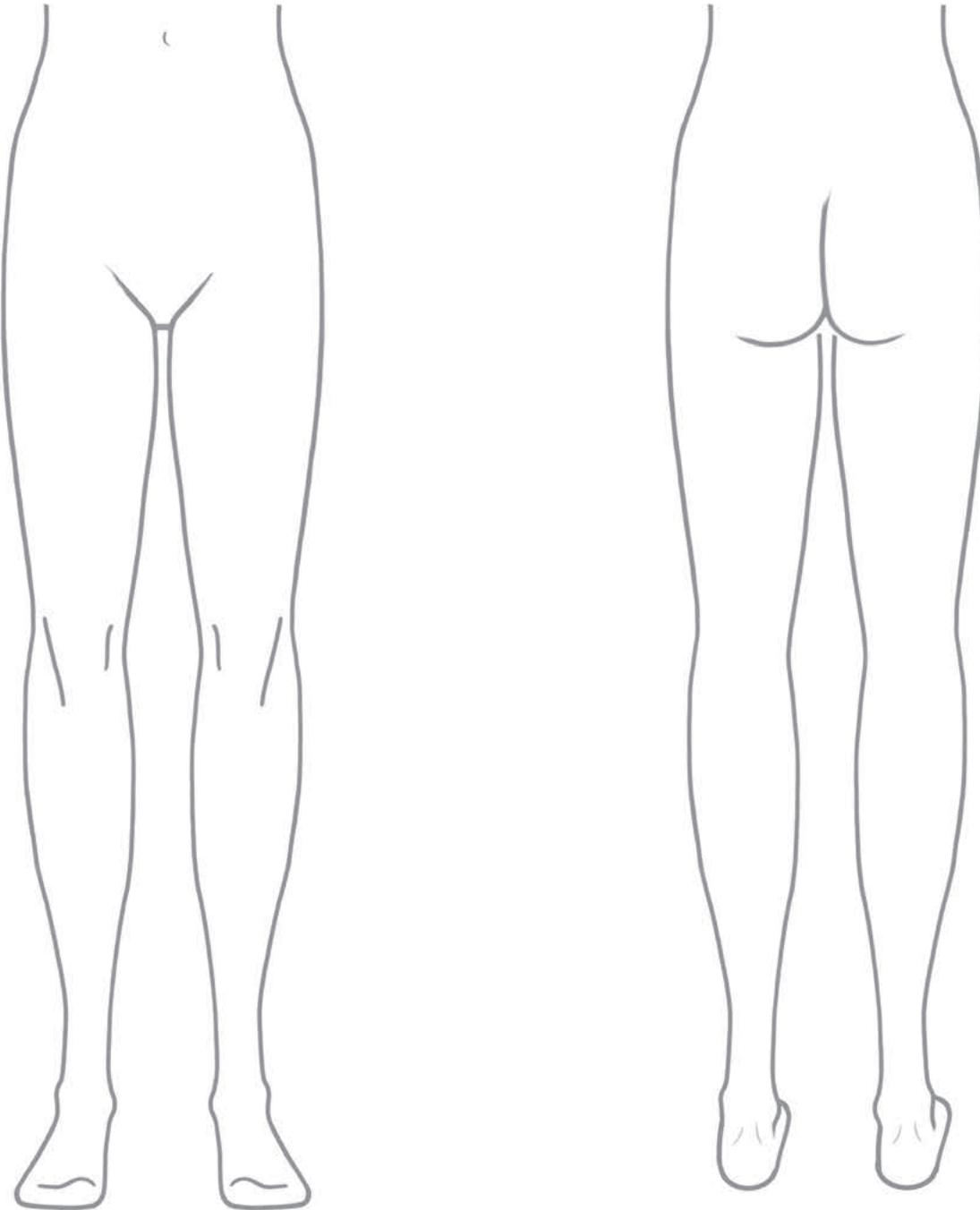

! Bitte nutzen Sie unsere
Skizzenblätter als Kopiervorlage.


Für gewünschte Modifikationen, Korrekturzüge
oder um Haltungs- und -Körper Besonderheiten
zu skizzieren.

MASSANLEITUNG


für BODYGUIDE® Leggins

Um eine gute Passform zu erreichen ist es von Vorteil über anliegender Unterwäsche zu messen. Alle Maße sollten glatt am Körper, also nicht zu stramm und nicht zu locker gemessen werden. Um genaue Längenmaße zu erreichen, ist es sinnvoll bei allen Umfangsmaßen eine kleine Linie mit einem abwaschbaren Stift auf dem Körper zu markieren.

Die Umfangsmaße sind auf den Maßblättern und in der Anleitung **rot** markiert, die Längenmaße **türkis**. Alle **dunkelblau** markierten Positionen sind Hilfslinien.

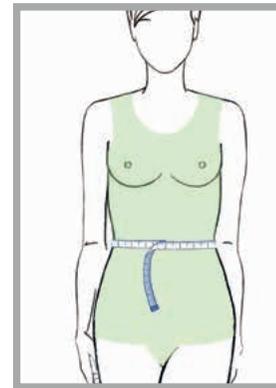


Als erstes sollte die Position der Taillenlinie festgelegt werden, indem man das Taillenmaßband waagrecht zirkulär auf Höhe der stärksten Taillenhöhlung (meistens auf Bauchnabelhöhe) legt und dort belässt.

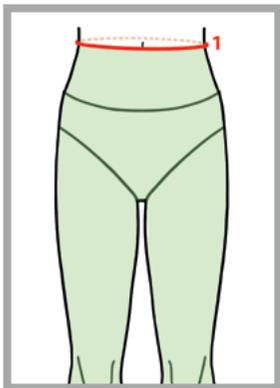


1. Taillenumfang

Der Taillenumfang wird waagrecht auf Höhe der stärksten Taillenhöhlung, oberhalb des Beckenkamms (meistens auf Bauchnabelhöhe) gemessen.

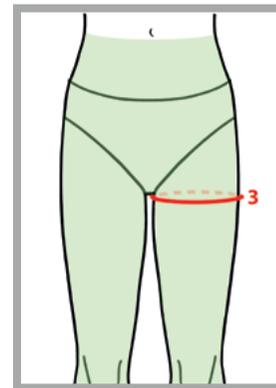


3. Oberschenkelumfang

Der Oberschenkelumfang wird waagrecht auf Schritthöhe (direkt unter der Gesäßfalte) gemessen.

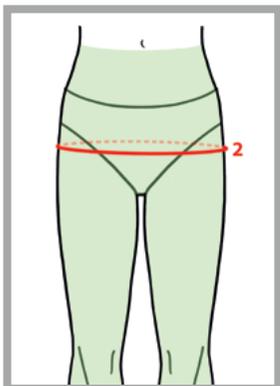


2. Hüftumfang

Hier wird ebenso wie beim Taillenumfang, waagrecht gemessen. Die Position des Maßbandes liegt auf der stärksten Stelle des Gesäßes.

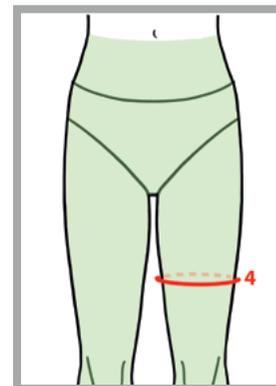


4. Umfang Mitte Oberschenkel

Hier wird zwischen dem Oberschenkelumfangsmaß und dem Knieumfang waagrecht gemessen.

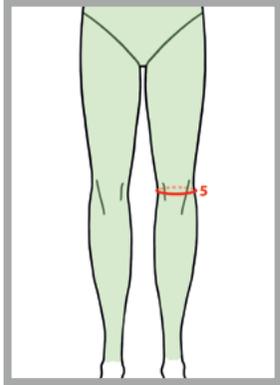


5. Knieumfang

Den Knieumfang misst man waagrecht auf Mitte der Kniescheibe, bzw. der stärksten Stelle des Knies.

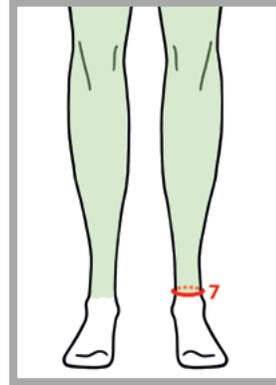


7. Fesselumfang

Der Umfang der Fessel wird waagrecht, direkt oberhalb des Knöchels an der schmalsten Stelle des Unterschenkels gemessen. Er bestimmt meist auch gleichzeitig das Längenmaß bei der langen Leggins.

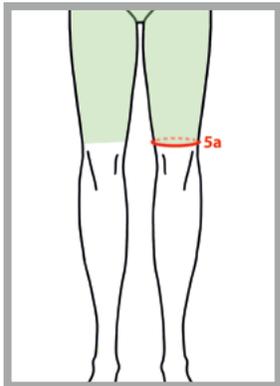


5a. Unterer Abschluss

Dieses Maß wird nur bei der kurzen Leggins benötigt und wird auf der gewünschten Höhe festgelegt. Auf dieser Höhe wird dann waagrecht zirkulär gemessen.

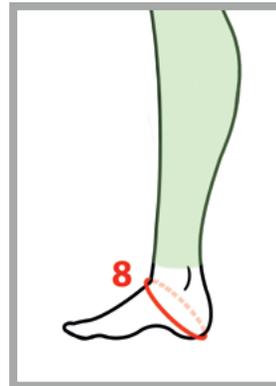


8. Rist (Fersenumfang)

Dieser Umfang wird diagonal über die Fersenrundung und den Rist gemessen.

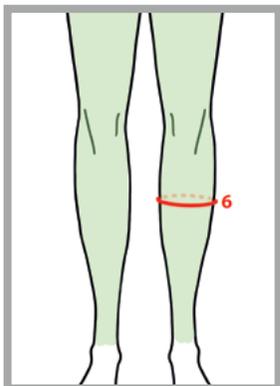


6. Wadenumfang

Der Wadenumfang wird waagrecht auf Höhe der stärksten Stelle der Wade gemessen. Sie befindet sich meist im oberen Bereich der Wade.

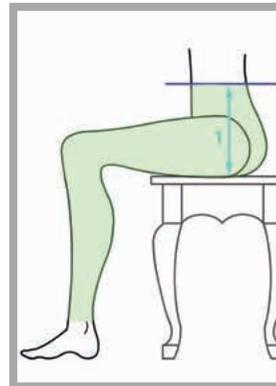


1. Leibhöhe

Die Leibhöhe wird sitzend, von der Taille abwärts über die Hüfte bis zur Sitzfläche gemessen.

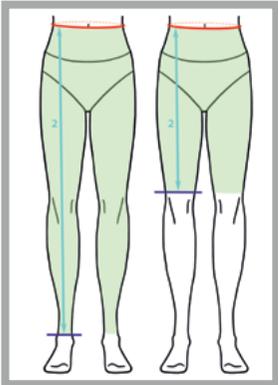


2. Gewünschte Länge

Dieses Längenmaß wird seitlich von der Taille abwärts über die Hüfte, am Verlauf des Beins entlang bis zur gewünschten Länge gemessen.

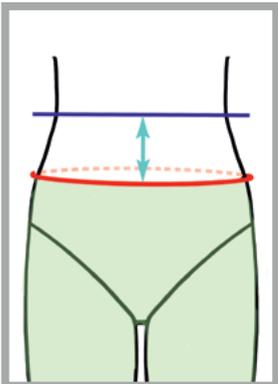


Bundhöhe – Tiefer Bund

Dieses Höhenmaß wird nur benötigt, falls ein tieferer Bund als in Taillenhöhe gewünscht wird. Hierbei wird dann zunächst die gewünschte Höhe festgelegt und dannach von von der Taille abwärts senkrecht bis zu dieser Stelle gemessen.

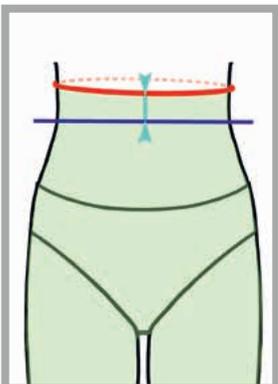

Bundhöhe + Hoher Bund



Dieses Höhenmaß wird nur benötigt, falls ein höherer Bund als in Taillenhöhe gewünscht wird. Hierbei wird dann zunächst die gewünschte Höhe festgelegt und dannach von von der Taille aufwärts senkrecht bis zu dieser Stelle gemessen.

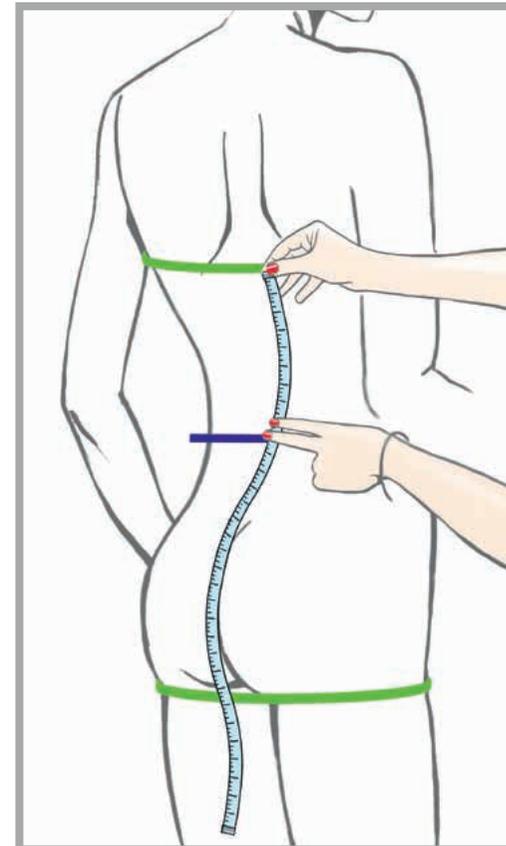

TIPP

Um exakte Höhenmaße zu erhalten, sollte das Maßband immer glatt entlang der Körperform geführt werden.

SKIZZENBLATT JUMSUIT KURZ

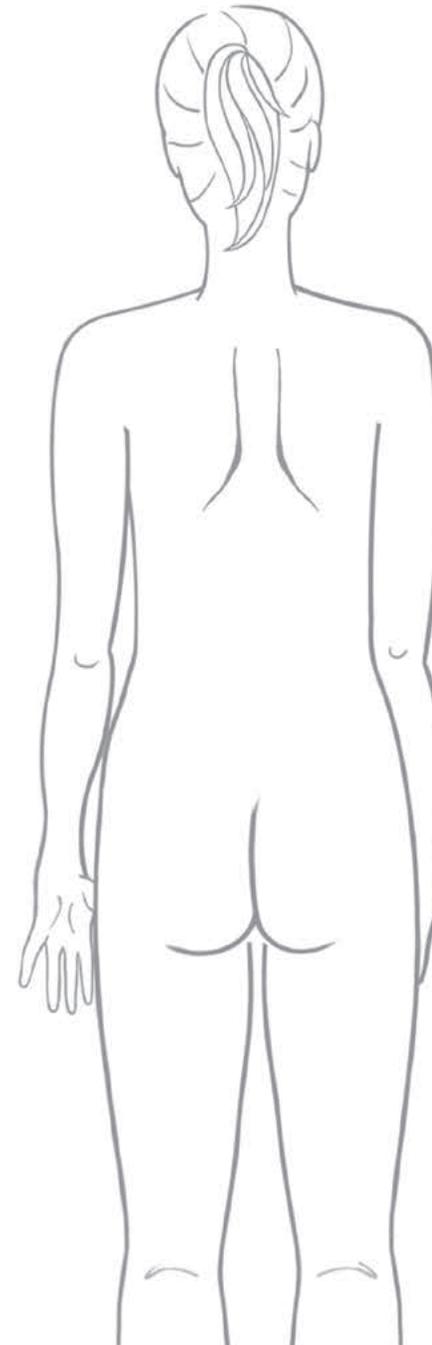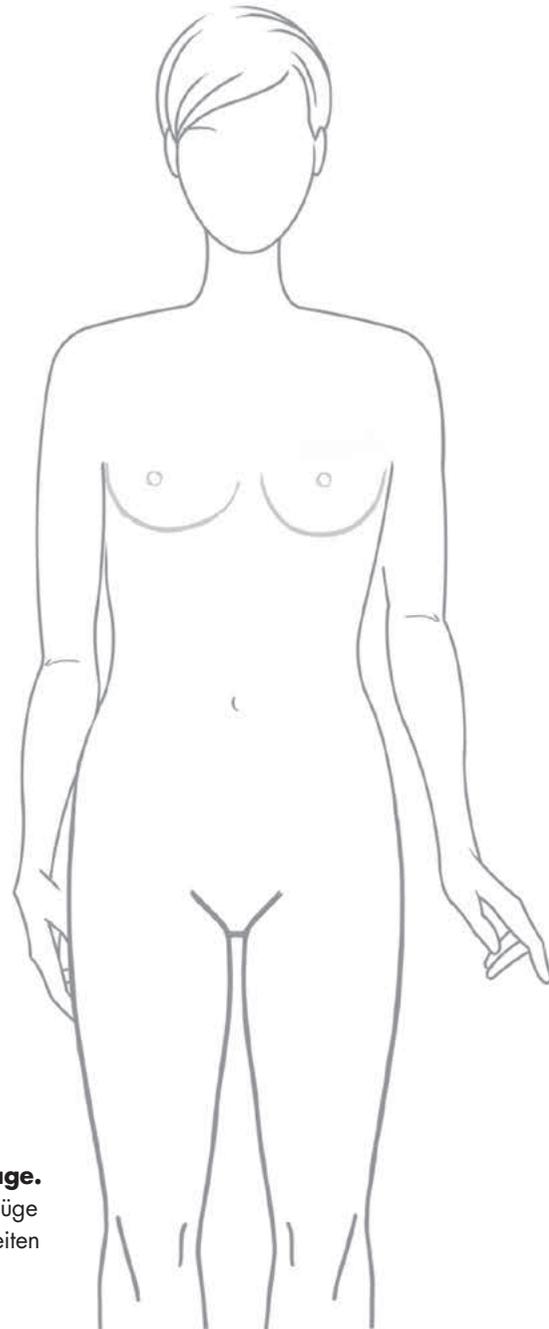


! Bitte nutzen Sie unsere
Skizzenblätter als Kopiervorlage.

Für gewünschte Modifikationen, Korrekturzüge
oder um Haltungs- und -Körper Besonderheiten
zu skizzieren.



JUMPSUIT KURZ

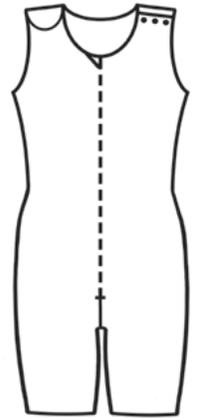


Neben Weste, Shirt und Body haben wir zur beckenübergreifenden Versorgung den Jumpsuit in unsere BODYGUIDE®-Serie aufgenommen. Durch die aufwendige Schnittkonstruktion entstehen nach Ihren Angaben maßgeschneiderte Softorthesen auf höchstem Niveau, die für die Versorgung von komplexen Beeinträchtigungen des Rumpfes, der Hüfte und Beine eingesetzt werden. Die Jumpsuits können wahlweise mit kurzem oder langem Beinabschluss und unserem speziellen Haftband bestellt werden.

Als Zusatz können in Verbindung mit dem Jumpsuit auch die abnehmbaren Ärmel eingesetzt werden, die durch eine Klettverbindung oder durch Druckknöpfe im Bereich der Schulter befestigt werden. Durch den Einsatz mit einem BODYGUIDE®-Jumpsuit können neben der Versorgung des Rumpfes aufgrund der Konstruktion auch die Hüfte und die untere Extremität versorgt werden.


! Bitte nutzen Sie unsere Maßblätter als Kopiervorlage.

Für eine Bestellung bitte jeweils Maßblatt 1 für die Maßangaben sowie Kontaktdaten und Maßblatt 2 für die gewünschte Ausführung ausfüllen.

MASSBLATT 1 JUMPSUIT KURZ

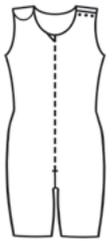

Jumpsuit kurz

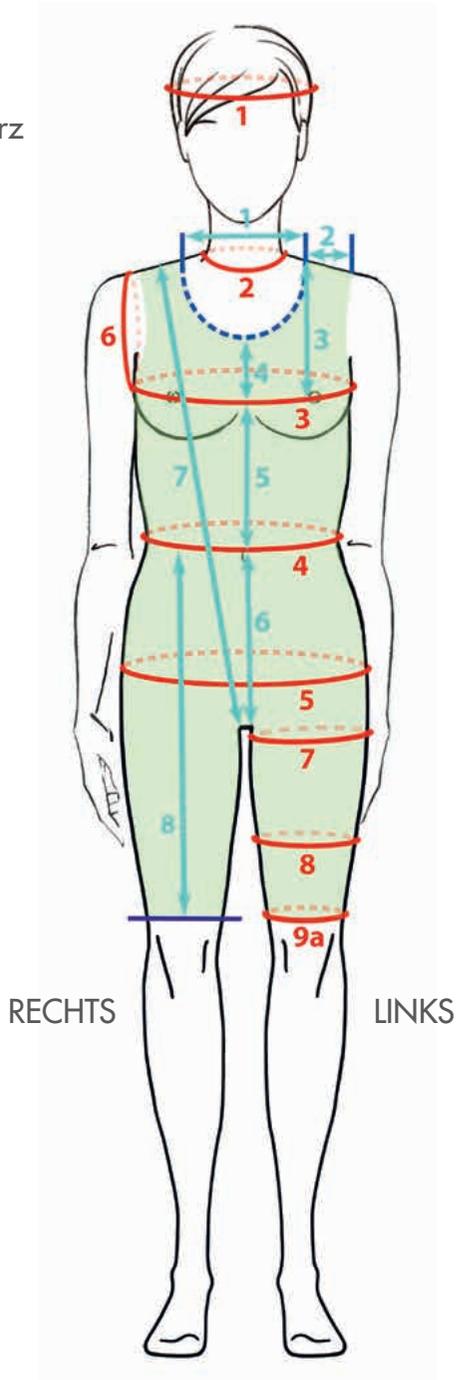

- 1. Kopfumfang
- 2. Halsumfang
- 3. Brustumfang
- 4. Taillenumfang
- 5. Hüftumfang
- 6. Vertikaler Schulterumfang
- 7. Oberarmumfang unter Pofalte
- 8. Umfang mitte Oberschenkel
- 9a. Umfang Saumabschluss

Umfangmaße

- 1. Halsausschnittbreite
- 2. Trägerbreite
- 3. Brusttiefe (Schulter-Brust)
- 4. Halsausschnitt Tiefe
- 5. Vorderlänge (Brust-Taile)
- 6. Hüfttiefe (Taille-Schritt)
- 7. Rumpfhöhe (Schulter-Schritt)
- 8. Beinlänge (Taille-Gewünschte Länge)

Längenmaße

KONTAKTDATEN		<input type="checkbox"/> ANGEBOT	<input type="checkbox"/> BESTELLUNG
Kundenr.:	Kommission:		
Anschrift:	Alter:	<input type="checkbox"/> Männlich	<input type="checkbox"/> Weiblich
	Körpergröße:		
	Diagnose:		
Telefon:	Ansprechpartner:		
Datum:	Unterschrift:		

1. Stoff: (Design bitte ankreuzen)

2. Ausführung:

- 1-lagig
- 2-lagig
- 3-lagig
- Vorderteil Rückenteil

3. Haftband:

- Saum

4. Verschluss:

Verschluss Schulter

- Klettverschluss Druckknopf

Verschluss Rumpf (zusätzlich)

- Reißverschluss kurz Reißverschluss lang
- Vorne Hinten Seitlich rechts Seitlich links
- Mit Druckknöpfen unterlegt

Passend zum Design

Kontrastfarbe:

- | | | | | | |
|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Schwarz | <input type="checkbox"/> Weiß | <input type="checkbox"/> Grau | <input type="checkbox"/> Blau | <input type="checkbox"/> Türkis | <input type="checkbox"/> Grün |
| <input type="checkbox"/> Gelb | <input type="checkbox"/> Orange | <input type="checkbox"/> Rot | <input type="checkbox"/> Pink | <input type="checkbox"/> Rosé | |

5. Stomaöffnung Öffnung für Sonde

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


(Bei der Anprobe genaue Position markieren)

Ausführung Öffnung für Sonde/Stoma

- Flexibel (nur mit Naht eingefasst)
- Leicht verstärkt/stabilisiert
- Mit Verstärkungsrahmen (fest)
- Abdeckung mit Klettverschluss
 - Rechts befestigt Links befestigt Oben befestigt Unten befestigt Lose



6. Zubehör:

- Abnehmbarer Ärmel*
 - Rechts Links

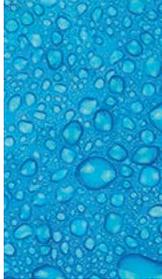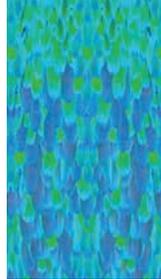					
<input type="checkbox"/> Black	<input type="checkbox"/> White	<input type="checkbox"/> Leaf	<input type="checkbox"/> Flash	<input type="checkbox"/> Fire	<input type="checkbox"/> Metal
					
<input type="checkbox"/> Rose	<input type="checkbox"/> Rain	<input type="checkbox"/> Zoo	<input type="checkbox"/> Wings	<input type="checkbox"/> Wall	<input type="checkbox"/> Fur
					
<input type="checkbox"/> Silver	<input type="checkbox"/> Kilt	<input type="checkbox"/> Pirates	<input type="checkbox"/> Unicorn	<input type="checkbox"/> Splash Pink	<input type="checkbox"/> Flowers


*bitte zusätzlich das Maßblatt „Abnehmbarer Ärmel“ Seite 52 – 53 ausfüllen.

SKIZZENBLATT JUMPSUIT LANG

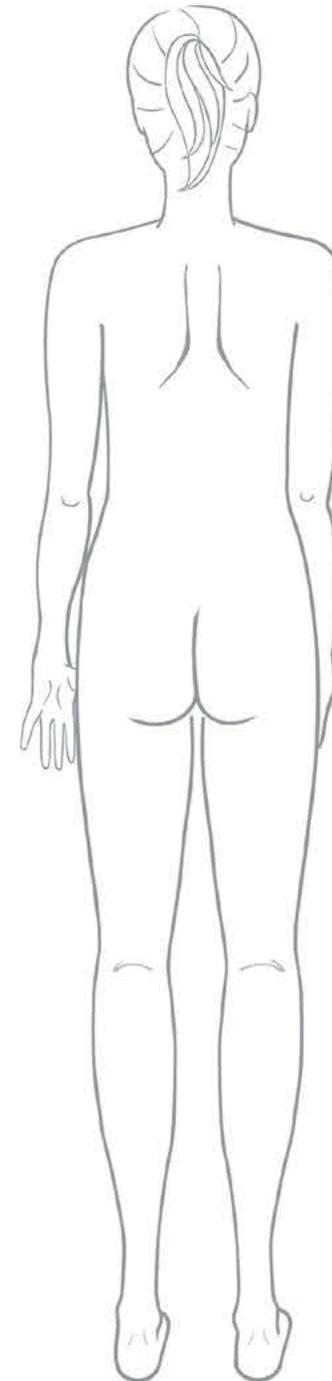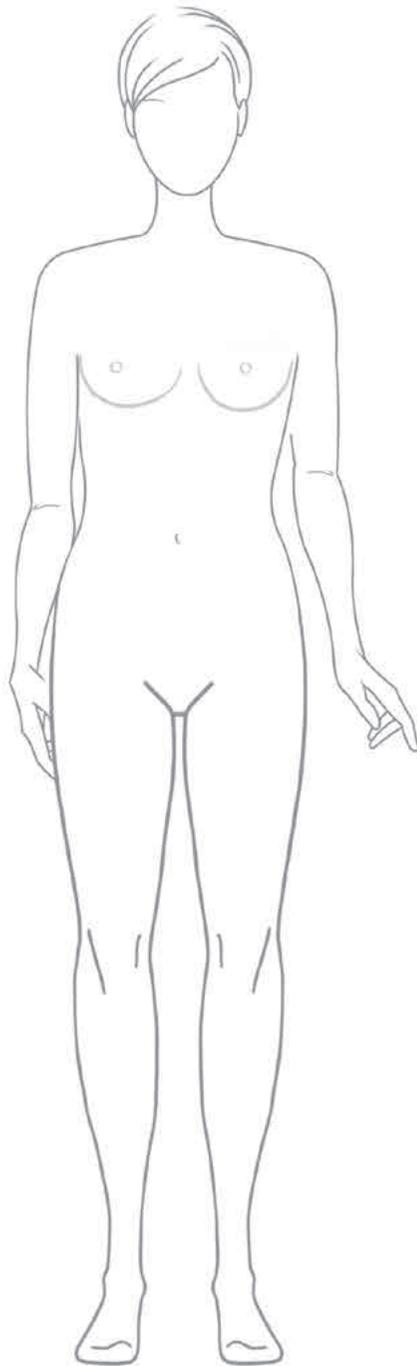

! Bitte nutzen Sie unsere
Skizzenblätter als Kopiervorlage.

Für gewünschte Modifikationen, Korrekturzüge
oder um Haltungs, und -Körper Besonderheiten
zu skizzieren.

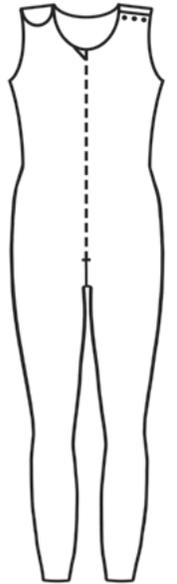

JUMPSUIT LANG

Neben Weste, Shirt und Body haben wir zur beckenübergreifenden Versorgung den Jumpsuit in unsere BODYGUIDE®-Serie aufgenommen. Durch die aufwendige Schnittkonstruktion entstehen nach Ihren Angaben maßgeschneiderte Softorthesen auf höchstem Niveau, die für die Versorgung von komplexen Beeinträchtigungen des Rumpfes, der Hüfte und Beine eingesetzt werden. Die Jumpsuits können wahlweise mit kurzem oder langem Beinabschluss und unserem speziellem Haftband bestellt werden.

Als Zusatz können in Verbindung mit dem Jumpsuit auch die abnehmbaren Ärmel eingesetzt werden, die durch eine Klettverbindung oder durch Druckknöpfe im Bereich der Schulter befestigt werden. Durch den Einsatz mit einem BODYGUIDE®-Jumpsuit können neben der Versorgung des Rumpfes aufgrund der Konstruktion auch die Hüfte und die untere Extremität versorgt werden.

! Bitte nutzen Sie unsere Maßblätter als Kopiervorlage.

Für eine Bestellung bitte jeweils Maßblatt 1 für die Maßangaben sowie Kontaktdaten und Maßblatt 2 für die gewünschte Ausführung ausfüllen.

MASSBLATT 2 JUMPSUIT LANG

1. Stoff: (Design bitte ankreuzen)

2. Ausführung:

- 1-lagig
- 2-lagig
- 3-lagig
- Vorderteil Rückenteil

3. Haftband:

- Saum

4. Saum offen:

(Empfohlen für Orthesenträger)

- Rechts Links

5. Verschluss:

Verschluss Schulter

- Klettverschluss Druckknopf

Verschluss Rumpf (zusätzlich)

- Reißverschluss kurz Reißverschluss lang
- Vorne Hinten Seitlich rechts Seitlich links
- Mit Druckknöpfen unterlegt

- Passend zum Design

Kontrastfarbe:

- Schwarz Weiß Grau Blau Türkis Grün
- Gelb Orange Rot Pink Rosé

6. Stomaöffnung Öffnung für Sonde

(Bei der Anprobe genaue Position markieren)

Ausführung Öffnung für Sonde/Stoma

- Flexibel (nur mit Naht eingefasst)
- Leicht verstärkt/stabilisiert
- Mit Verstärkungsrahmen (fest)
- Abdeckung mit Klettverschluss
 - Rechts befestigt Links befestigt Oben befestigt Unten befestigt Lose

7. Zubehör:

- Abnehmbare Ärmel*
 - Rechts Links

* bitte zusätzlich das Maßblatt „Abnehmbarer Ärmel“ Seite 52 und 53 ausfüllen.




MASSANLEITUNG


für **BODYGUIDE**® Jumpsuit

Um eine gute Passform zu erreichen ist es von Vorteil über anliegender Unterwäsche zu messen. Alle Maße sollten glatt am Körper, also nicht zu stramm und nicht zu locker gemessen werden. Um genaue Längenmaße zu erreichen, ist es sinnvoll bei allen Umfangsmaßen eine kleine Linie mit einem abwaschbaren Stift auf dem Körper zu markieren.

Die Umfangsmaße sind auf den Maßblättern und in der Anleitung **rot** markiert, die Längenmaße **türkis**. Alle **dunkelblau** markierten Positionen sind Hilfslinien.

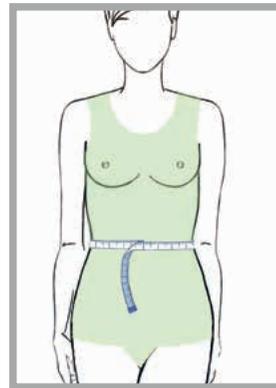


Als erstes sollte die Position der Taillenlinie festgelegt werden, indem man das Taillenmaßband waagrecht zirkulär auf Höhe der stärksten Taillenhöhlung (meistens auf Bauchnabelhöhe) legt und dort belässt.

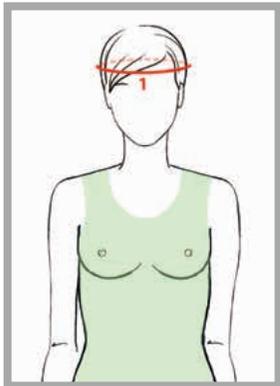


1. Kopfumfang

Hier wird waagrecht über die Stirn und den Hinterkopf auf Höhe des größten Kopfumfanges gemessen.

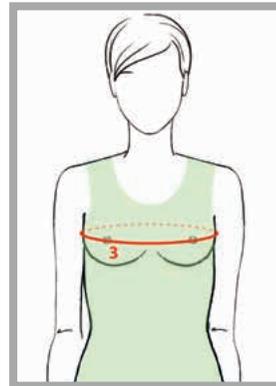


3. Brustumfang

Der Brustumfang wird waagrecht, auf Höhe der stärksten Stelle der Brust bzw. des größten Brustumfangs (üblicherweise auf Höhe der Brustwarze) nach hinten leicht ansteigend gemessen.

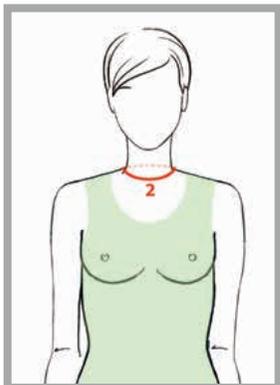


2. Halsumfang

Den Halsumfang misst man waagrecht am Ansatz des Halses.

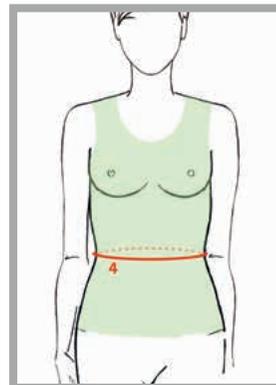


4. Taillenumfang

Der Taillenumfang wird waagrecht, auf Höhe der stärksten Taillenhöhlung, oberhalb des Beckenkamms (meistens auf Bauchnabelhöhe) gemessen.

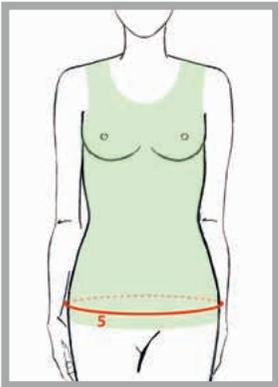


5. Hüftumfang

Hier wird ebenso wie bei Taillen- und Brustumfang, waagrecht gemessen. Die Position des Maßbandes liegt auf der stärksten Stelle des Gesäßes.

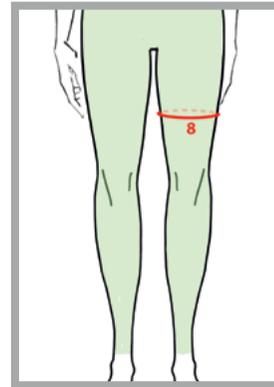


8. Umfang Mitte Oberschenkel

Hier wird zwischen dem Oberschenkelumfangmaß und dem Knieumfang waagrecht gemessen.

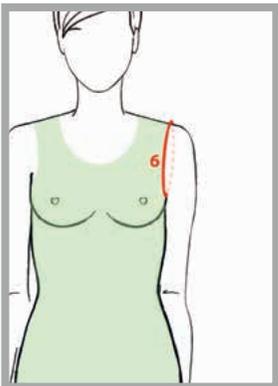


6. Vertikaler Schulterumfang

Hier wird von der Schulter ab, vertikal unter dem angelegten Arm durch die Achsel bis wieder zu Schulter hinauf gemessen.

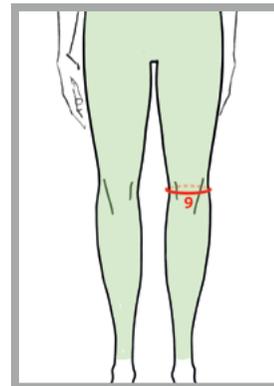


9. Knieumfang

Den Knieumfang misst man waagrecht auf Mitte der Knie- scheibe, bzw. der stärksten Stelle des Knies.

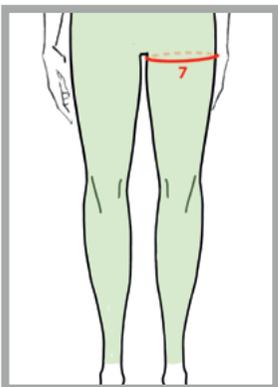


7. Oberschenkelumfang

Der Oberschenkelumfang wird waagrecht auf Schritthöhe (direkt unter der Gesäß- falte) gemessen.

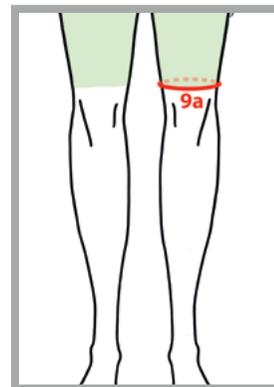


9a. Umfang Saumabschluß

Dieses Maß wird nur beim kurzen Jumpsuit benötigt und wird auf der gewünschten Höhe bzw. Beinlänge festgelegt. Auf dieser Höhe wird dann waagrecht gemessen.

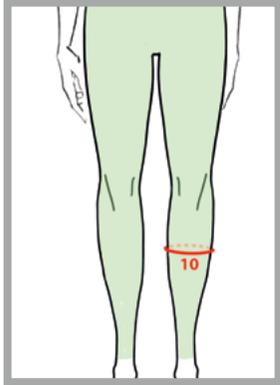


10. Wadenumfang

Der Wadenumfang wird waagrecht auf Höhe der stärksten Stelle der Wade gemessen. Sie befindet sich meist im oberen Bereich der Wade.

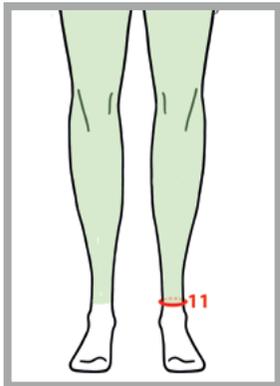


11. Fesselumfang

Der Umfang der Fessel wird direkt oberhalb des Knöchels an der schmalsten Stelle des Unterschenkels gemessen. Er bestimmt meist auch gleichzeitig die Beinlänge beim langen Jumpsuit.

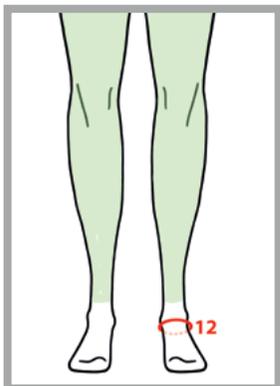


12. Rist (Fersenumfang)

Dieser Umfang wird diagonal über die Fersenrundung und den Rist gemessen.

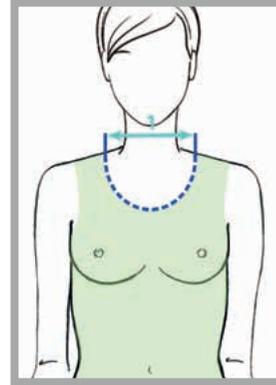


1. Halsausschnittbreite

Zuerst sollte die gewünschte Ausschnittweite mittels Markierungen seitlich vom Hals festgelegt werden. Danach wird waagrecht, halsnah von einer Markierung zur anderen gemessen.

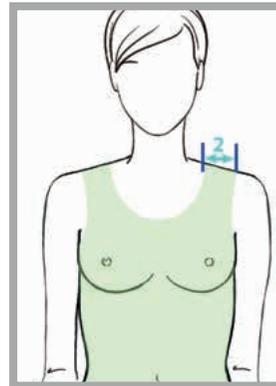


2. Trägerbreite

Hier wird einfach die gewünschte Trägerbreite eingetragen. Die Trägerbreite ist in der Regel ein paar cm schmaler als die Schulterbreite.

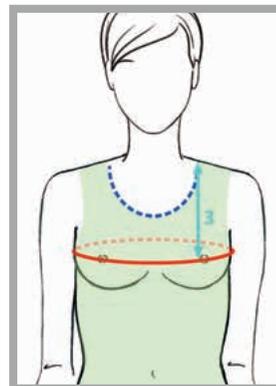


3. Brusthöhe (Schulter-Brust)

Hier wird vertikal, ab der Schultermitte, an der zuvor markierten Ausschnittbreite entlang bis zur Brusthöhe gemessen.

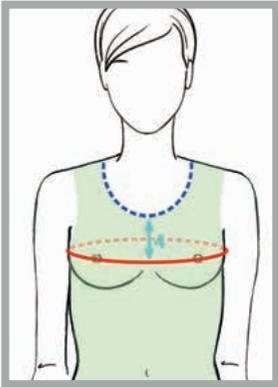


4. Halsausschnitt Tiefe

Dieses Längenmaß ist abhängig von der gewünschten Halsausschnitt Tiefe. Dabei wird von dem zuvor markierten Halsausschnitt vertikal bis zur Brusthöhe (auf Höhe des größten Brustumfangs) gemessen

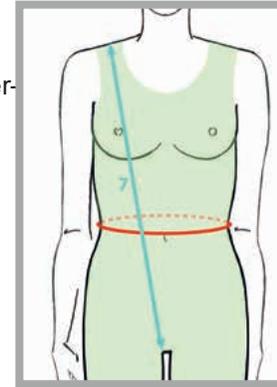


7. Rumpfhöhe (Schulter-Schritt)

Dieses Längenmaß wird sitzend, von der Schultermitte abwärts über den Rücken bis zur Sitzfläche gemessen.

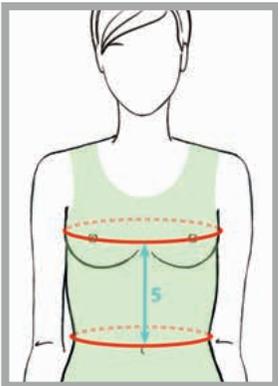


5. Vorderlänge (Brust-Taile)

Hier wird von der Brusthöhe vertikal bis zur Taillenhöhe gemessen.

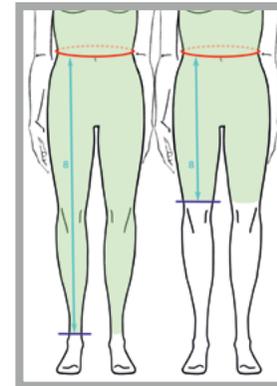


8. Beinlänge (Taille-Fessel)

Dieses Längenmaß wird seitlich von der Taille abwärts über die Hüfte, am Verlauf des Beins entlang bis zur gewünschten Länge gemessen.

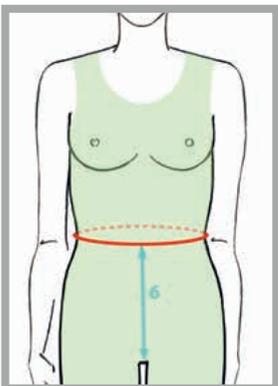



6. Leibhöhe (Taille-Schritt)

Die Leibhöhe wird sitzend, von der Taille abwärts über die Hüfte bis zur Sitzfläche gemessen.

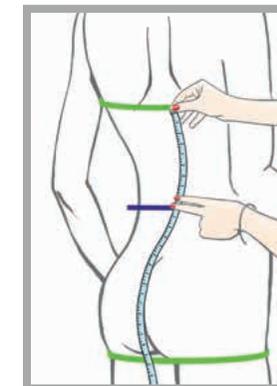

TIPP

Um exakte Höhenmaße zu erhalten, sollte das Maßband immer glatt entlang der Körperform geführt werden.

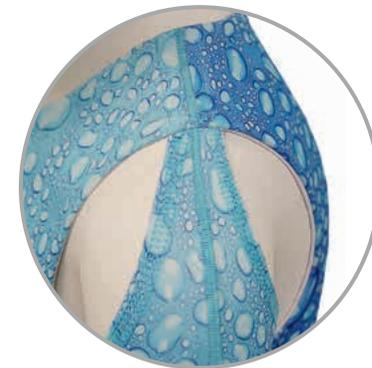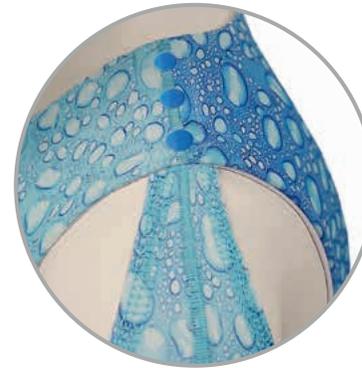

Bei den Ärmelverbindungen zum Oberteilträger kann zwischen der Verschlussart Klettverschluss oder Druckknöpfen, sowie über dem Träger liegendem oder unter dem Träger liegendem Ärmel gewählt werden.



ABNEHMBARER ÄRMEL




Als Erweiterung zu unseren BODYGUIDE® Produkten: Weste, Jumpsuit und Top sind zukünftig auch abnehmbare Ärmel in den unterschiedlichen Dekoren erhältlich. Die Befestigung an der Rumpfversorgung erfolgt wahlweise mit Klett-Flauschbesatz oder Druckknöpfen die im Bereich des Schulterdaches befestigt werden.

Die individuell gefertigten Ärmel können einlagig oder für eine höhere Kompressionswirkung auch doppellagig bestellt werden. Die bei 30°C waschbaren Unikate können optional auch mit einem speziellen Haftband am Saum versehen werden, um ein Hochrutschen des Ärmels bei Bewegungen des Ellenbogens zu verhindern.

! Bitte nutzen Sie unsere Maßblätter als Kopiervorlage.

Für eine Bestellung bitte jeweils Maßblatt 1 für die Maßangaben sowie Kontaktdaten und Maßblatt 2 für die gewünschte Ausführung ausfüllen.

MASSBLATT 1 ABNEHMBARER ÄRMEL

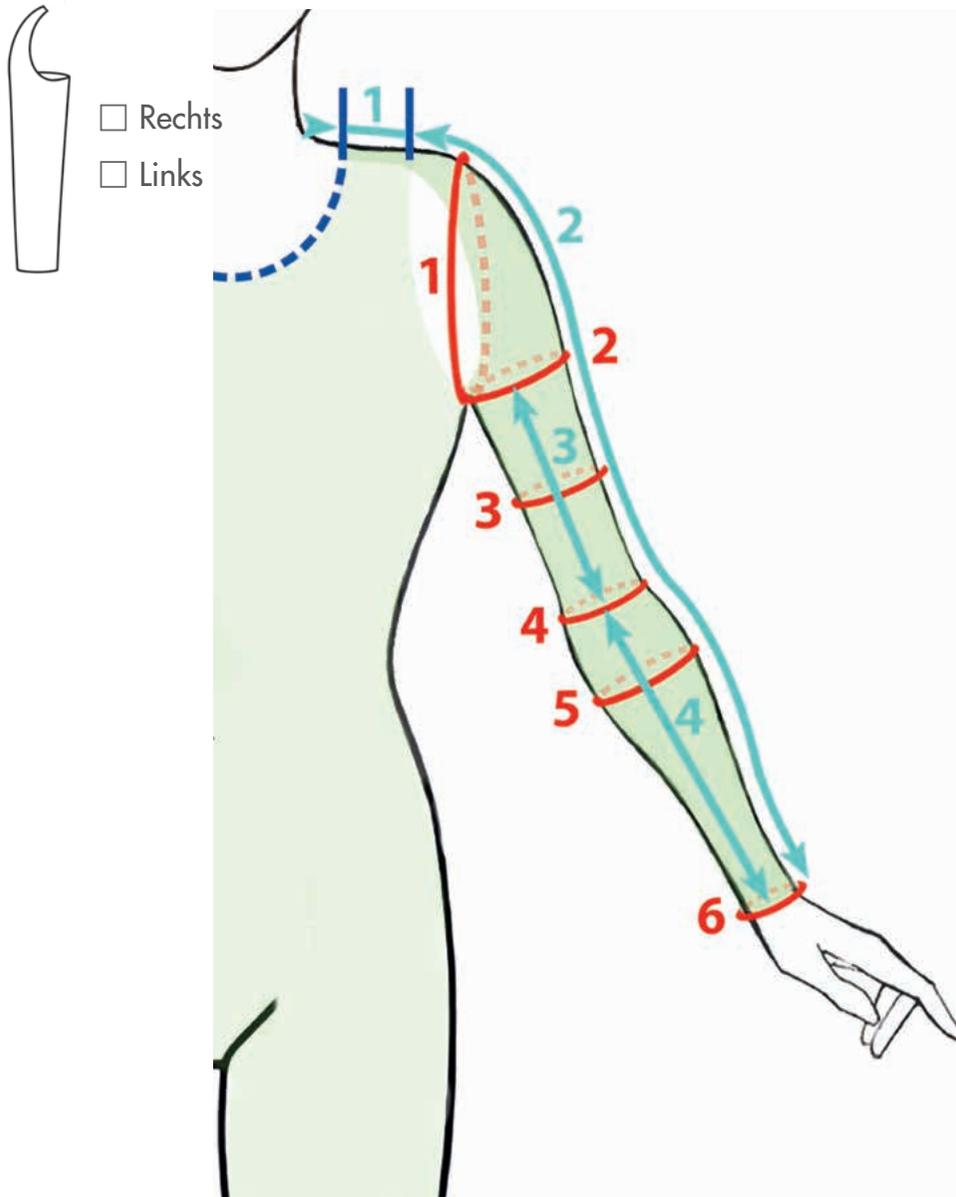

- 1. Vertikaler Schulterumfang
- 2. Oberarmumfang
- 3. Umfang Bizeps.....
- 4. Umfang Ellenbogen.....
- 5. Stärkster Unterarm Umfang
- 6. Handgelenkumfang.....

Rechts	Links

Umfangmaße

- 1. Trägerbreite
- 2. Ärmellänge ab Träger.....
- 3. Oberarmlänge bis Ellenbogen.....
- 4. Unterarmlänge

Rechts	Links

Längenmaße

KONTAKTDATEN		<input type="checkbox"/> ANGEBOT	<input type="checkbox"/> BESTELLUNG
Kundennr.:	Kommission:		
Anschrift:	Alter:	<input type="checkbox"/> Männlich	<input type="checkbox"/> Weiblich
	Körpergröße:		
	Diagnose:		
Telefon:	Ansprechpartner:		
Datum:	Unterschrift:		

MASSBLATT 2 ABNEHMBARER ÄRMEL

1. **Stoff:** (Design bitte ankreuzen)

2. **Ausführung:**

- 1-lagig
- 2-lagig

3. **Haftband:**

- Saum

4. **Verschluss:** mit Oberteil verbunden

- Ärmelverbindung unter Oberteilträger liegend
- Ärmelverbindung über Oberteilträger liegend
- Klettverschluss
- Druckknöpfe


Passend zum Design

Kontrastfarbe:

- | | | | | | |
|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Schwarz | <input type="checkbox"/> Weiß | <input type="checkbox"/> Grau | <input type="checkbox"/> Blau | <input type="checkbox"/> Türkis | <input type="checkbox"/> Grün |
| <input type="checkbox"/> Gelb | <input type="checkbox"/> Orange | <input type="checkbox"/> Rot | <input type="checkbox"/> Pink | <input type="checkbox"/> Rosé | |



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Black



White



Leaf



Flash




Fire



Metal




Rose

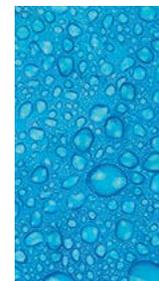

Rain




Zoo

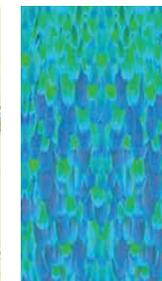

Wings



Wall

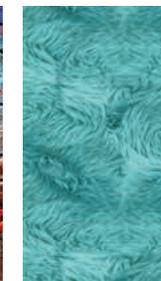

Fur



Silver



Kilt



Pirates



Unicorn




Splash Pink



Flowers

SKIZZENBLATT ABNEHMBARER ÄRMEL

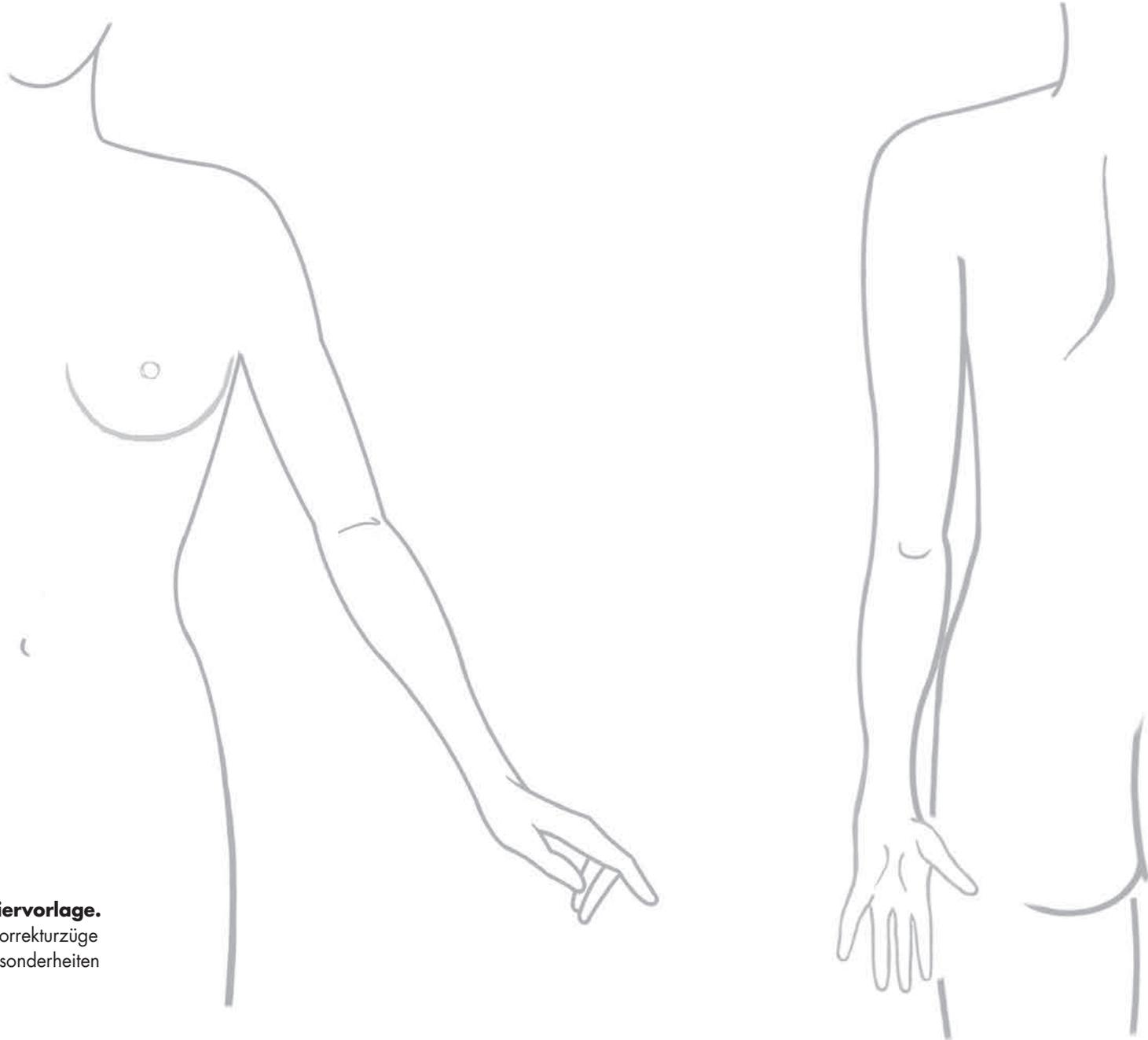

! Bitte nutzen Sie unsere
Skizzenblätter als Kopiervorlage.

Für gewünschte Modifikationen, Korrekturzüge
oder um Haltungen, und -Körper Besonderheiten
zu skizzieren.


MASSANLEITUNG

für **BODYGUIDE®** Abnehmbarer Ärmel


Alle Maße sollten glatt am Körper, also nicht zu stramm und nicht zu locker gemessen werden. Das Maßnehmen für den abnehmbaren Ärmel sollte im Zusammenhang mit dem dazu gehörigen Oberteil (Weste, Top oder Jumpsuit) erfolgen.

Wird ein Abnehmbarer Ärmel zu einem späteren Zeitpunkt bestellt, sollte beim Maßnehmen das dazu gehörige Oberteil angezogen werden, um korrekte Längenmaße zu erhalten.

Die Umfangsmaße sind auf den Maßblättern und in der Anleitung **rot** markiert, die Längenmaße **türkis**. Alle **dunkelblau** markierten Positionen sind Hilfslinien.

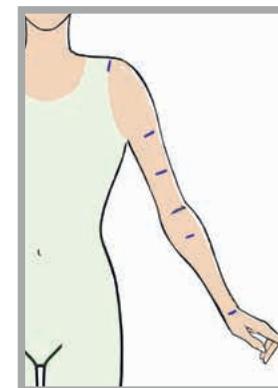


Um genaue Längenmaße zu erreichen, ist es sinnvoll bei allen Umfangsmaßen eine kleine Linie mit einem abwaschbaren, hautfreundlichen Stift auf dem Körper zu markieren.

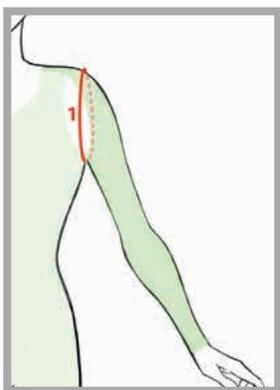


1. Vertikaler Schulterumfang

Hier wird von der Schulter ab, vertikal unter dem angelegten Arm durch die Achsel bis wieder zu Schulter hinauf gemessen

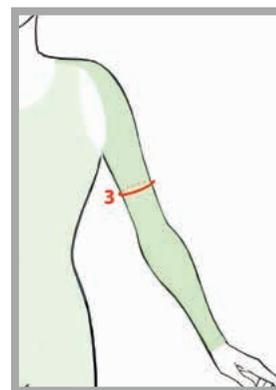


3. Umfang Bizeps

Auch hier wird auf Höhe des größten Umfangs des Bizeps gemessen.

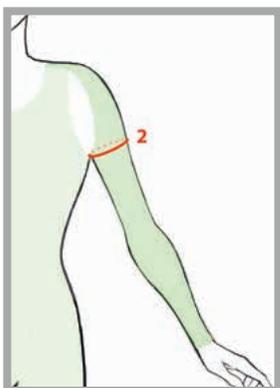


2. Oberarmumfang

Der Umfang des Oberarms wird direkt unter der Achsel hindurch über den Oberarmmuskel gemessen.

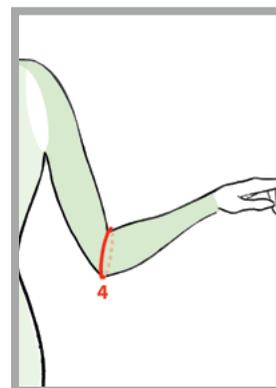


4. Umfang Ellenbogen

Beim Messen des Ellenbogenumfangs sollte der Ober- und Unterarm im rechten Winkel gebeugt werden. Dann wird in der Armbeuge über die stärkste Stelle des Ellenbogens Maß genommen.

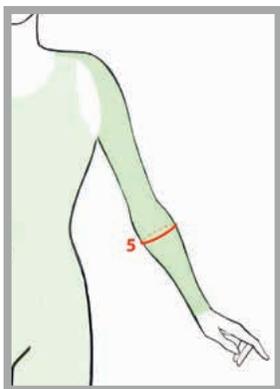

5. Stärkster Unterarm Umfang


Der Umfang des Unterarms wird auf Höhe der stärksten Stelle des Unterarmmuskels gemessen.

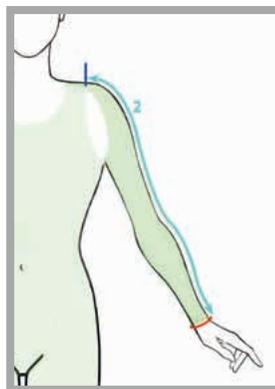

2. Ärmellänge ab Träger


Dieses Maß wird ab der zuvor markierten äußeren Position des Trägers über den leicht angewinkelten Ellenbogen bis zum Handgelenk, oder der gewünschten Ärmellänge gemessen.

Wird der abnehmbare Ärmel nachträglich bestellt, wird bei angezogenem Oberteil von der äußeren Trägerkante ab gemessen.

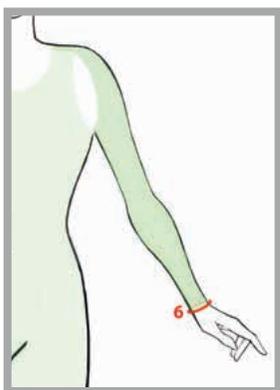


6. Handgelenkumfang

Beim Handgelenkumfang wird zirkulär über der Handwurzel gemessen.

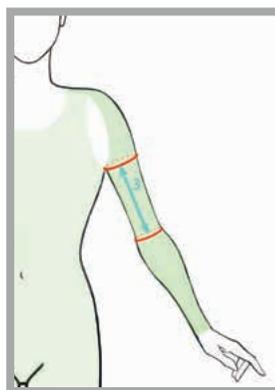


3. Oberarmlänge bis Ellenbogen

Hier wird vom Armansatz in der Achsel bis zur Markierung Ellenbogen Armbeuge gemessen.

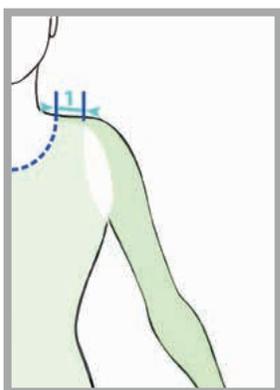

1. Trägerbreite

Hier wird Trägerbreite des dazu gehörigen Oberteils (Weste, Top, Jumpsuit) gemessen.

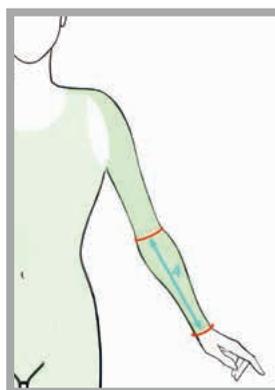

4. Unterarmlänge

Die Unterarmlänge wird von der Markierung Ellenbogen Armbeuge bis zum Handgelenk oder der gewünschten Ärmellänge gemessen.



HANDSCHUH


Ergänzend zu den abnehmbaren Ärmeln und den Arm- und Beinsleeves können Sie bei uns auch maßangefertigte Handschuhe in den farnefrohen Designvarianten bestellen. Hierbei werden die Fingergrundgelenke zirkulär eingefasst und der Daumen separat geführt. Optional können der obere und untere Abschluss mit einem speziellen Haftband versehen werden. Wie auch bei den Arm- und Beinsleeves besteht die Möglichkeit, unterschiedliche Korrekturzüge zur Stabilisierung und Korrektur einzuarbeiten. Neben den unterschiedlichen Korrekturmöglichkeiten bewirkt das Tragen der eng anliegenden Handschuhe eine Verbesserung der sensorischen Wahrnehmung und eine Erhöhung der feinmotorischen Handfunktionen.



! Bitte nutzen Sie unsere Maßblätter als Kopiervorlage.

Für eine Bestellung bitte jeweils Maßblatt 1 für die Maßangaben sowie Kontaktdaten und Maßblatt 2 für die gewünschte Ausführung ausfüllen.

MASSBLATT 1 HANDSCHUH

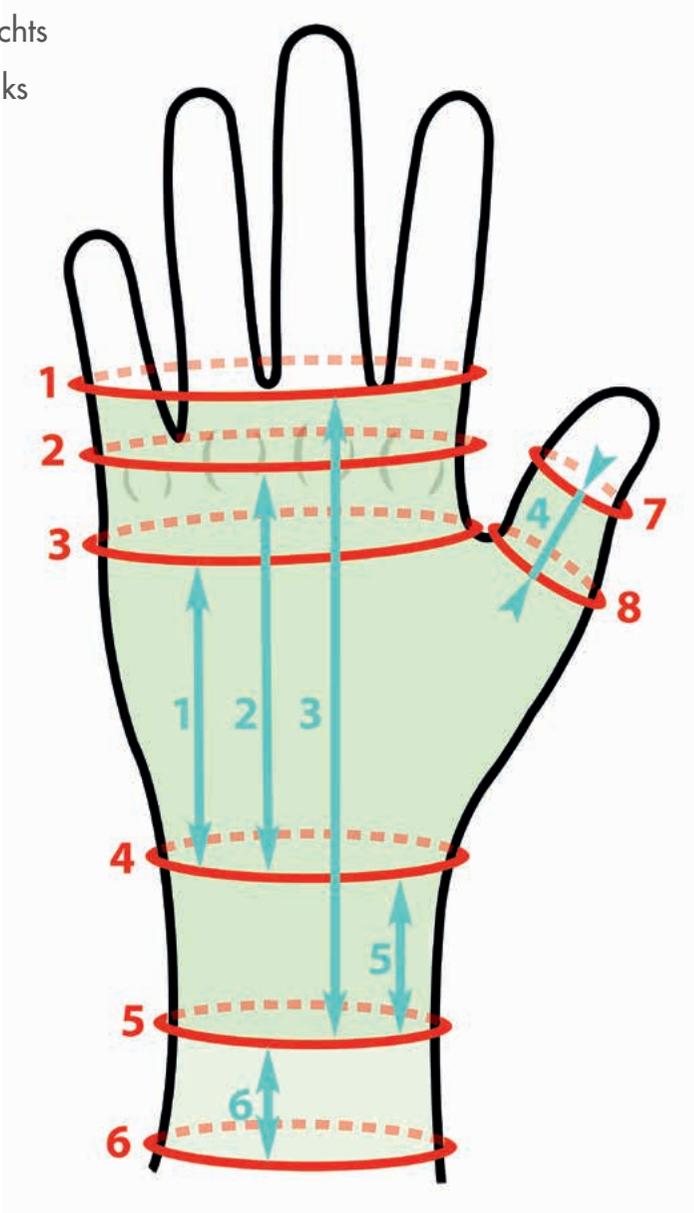

1. Abschluss distal.....
2. Fingergrundgelenke MCP.....
3. Mittelhandumfang.....
4. Handgelenkumfang.....
5. Handgelenkabschluss.....
6. Unterarmabschluss.....
7. Daumenabschluss.....
8. Daumenanfang Grundgelenk.....

Rechts	Links

Umfangmaße

1. Mittelhandlänge.....
2. Handlänge.....
3. Gesamtlänge.....
4. Daumenlänge.....
5. Handgelenk Schaftlänge.....
6. Unterarm Schaftlänge.....

Rechts	Links

Längenmaße

KONTAKTDATEN		<input type="checkbox"/> ANGEBOT	<input type="checkbox"/> BESTELLUNG
Kundennr.:	Kommission:		
Anschrift:	Alter:	<input type="checkbox"/> Männlich	<input type="checkbox"/> Weiblich
	Körpergröße:		
	Diagnose:		
Telefon:	Ansprechpartner:		
Datum:	Unterschrift:		

MASSBLATT 2 HANDSCHUH

1. Stoff: (Design bitte ankreuzen)

2. Ausführung:

- 1-lagig
- 2-lagig

3. Haftband:

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
- Fingerabschluss
- Handgelenk

4. Verschluss:

- Reißverschluss kurz Klettverschluss
- Passend zum Design
- Kontrastfarbe:
- Schwarz Weiß Grau Blau Türkis
- Grün Gelb Orange Rot Pink Rosé



Black



White



Leaf



Flash




Fire



Metal




Rose

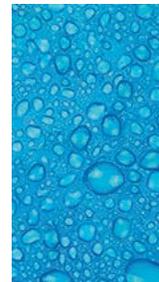

Rain



Zoo

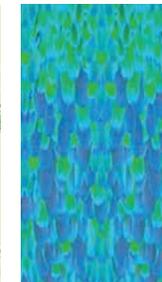

Wings



Wall



Fur



Silver



Kilt



Pirates



Unicorn




Splash Pink



Flowers

SKIZZENBLATT HANDSCHUH

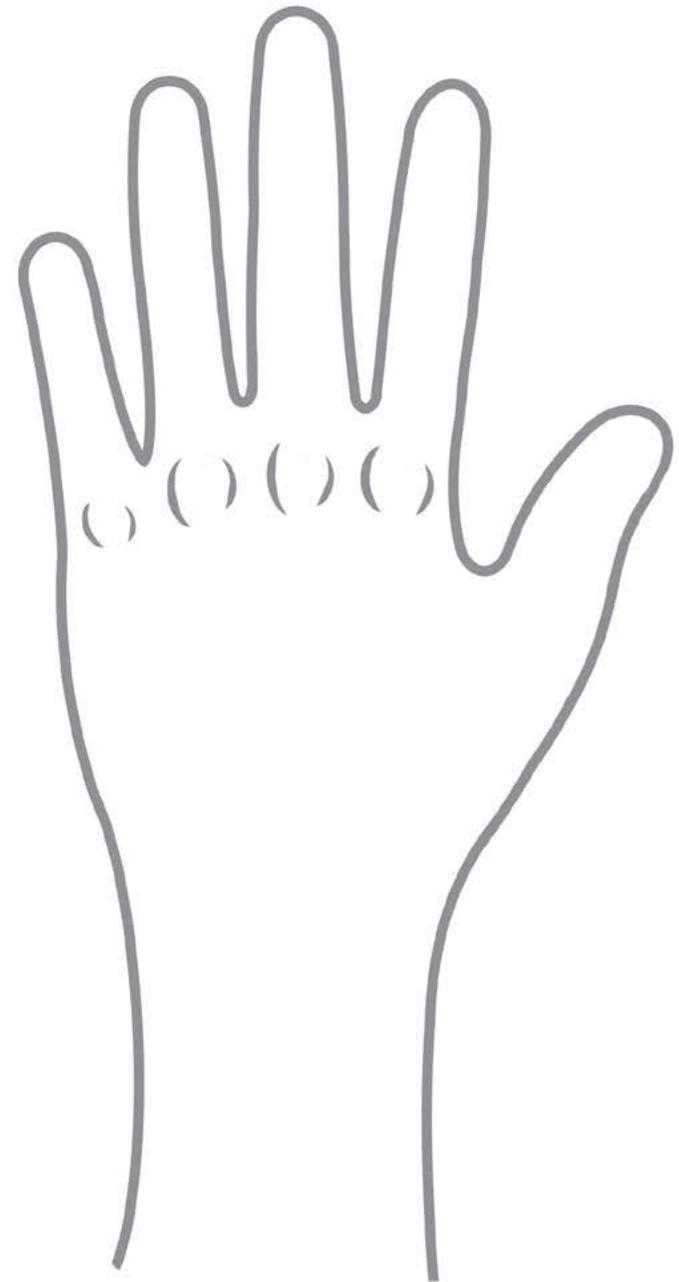

! Bitte nutzen Sie unsere
Skizzenblätter als Kopiervorlage.


Für gewünschte Modifikationen, Korrekturzüge
oder um Haltungs- und -Körper Besonderheiten
zu skizzieren.

MASSANLEITUNG


für **BODYGUIDE**® Handschuh

Alle Maße sollten glatt am Körper, also nicht zu stramm und nicht zu locker gemessen werden. Um genaue Längenmaße zu erreichen, ist es sinnvoll bei allen Umfangsmaßen eine kleine Linie mit einem abwaschbaren Stift auf dem Körper zu markieren.

Die Umfangsmaße sind auf den Maßblättern und in der Anleitung **rot** markiert, die Längenmaße **türkis**. Alle **dunkelblau** markierten Positionen sind Hilfslinien.

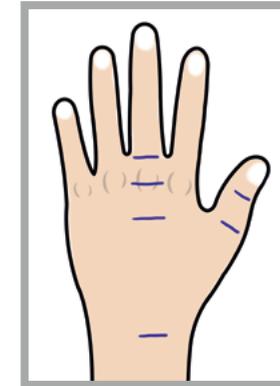


Vorab wird die Gesamtlänge, danach alle benötigten Umfangsmaße ermittelt und anschließend auf der Hand markiert. Dies ermöglicht ein zügiges und genaues Maßnehmen.

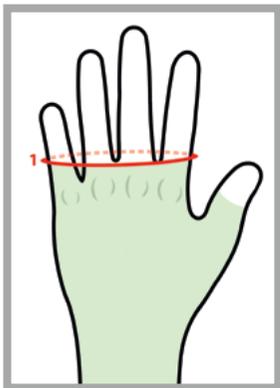


1. Abschluss Distal

Hier wird der Umfang an der zuvor festgelegten Position des Handschlusses distal gemessen. Diese Position liegt in der Regel direkt am Ende der Fingergrundgelenke (distal).

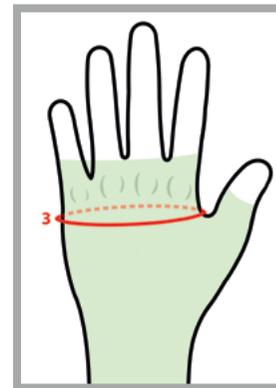


3. Mittelhandumfang

Hier wird am Anfang der Daumenfalte über den Handrücken und Innenfläche der Hand bei leicht gespreizten Fingern gemessen.

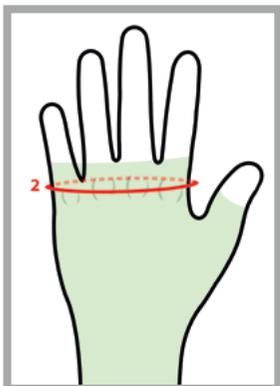


2. Fingergrundgelenke (MCP)

Dieser Umfang wird über den Fingergrundgelenken des Zeige-, Mittel-, Ring- und kleinen Fingers gemessen.

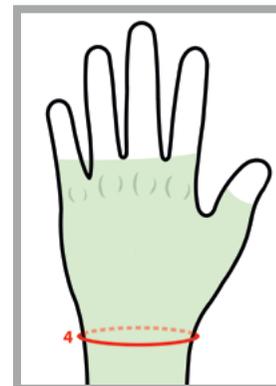


4. Handgelenkumfang

Der Handgelenkumfang wird direkt über die Handwurzel gemessen.

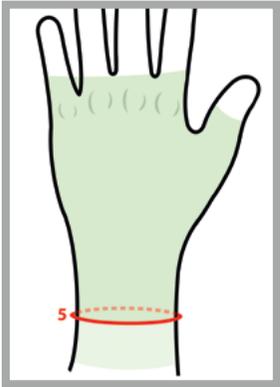


5. Handgelenk-Abschluss

Hier wird der Umfang, der zuvor festgelegten Position des gewünschten, proximalen Handschuh-Abschlusses gemessen. Wird ein längerer Handschuhschaft z. B. bis Mitte Unterarm gewünscht, wird dieser Umfang an der schmalsten proximalen Position direkt hinter dem Handgelenk gemessen.

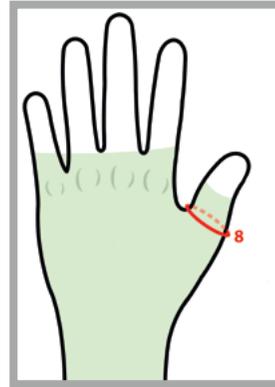


8. Umfang Daumengrundgelenk

Hier wird über das Daumengrundgelenk am Ansatz der Daumenfalte entlang gemessen.

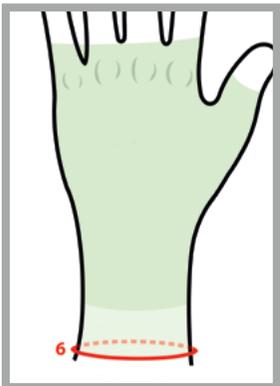


6. Unterarm-Abschluss

Dieses Umfangsmaß wird nur benötigt, wenn der Handschuhschaft über den Handgelenk-Abschluss (Punkt 5) gehen soll. Hier wird dann der Umfang der zuvor festgelegten proximalen Abschluss Länge z.B. Mitte Unterarm gemessen.

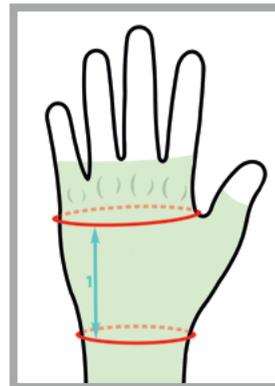


1. Mittelhand Länge

Dieses Längenmaß wird von der Position des Handgelenks bis zur Position der Mittelhand (Höhe Daumenfalte) gemessen.

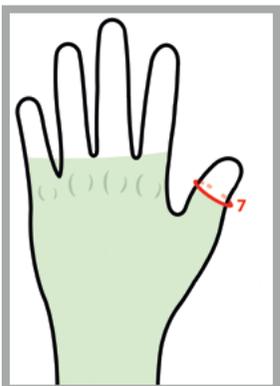


7. Daumenabschluss

Dieses Umfangsmaß wird am gewünschten Ende des distalen Daumenabschlusses gemessen.

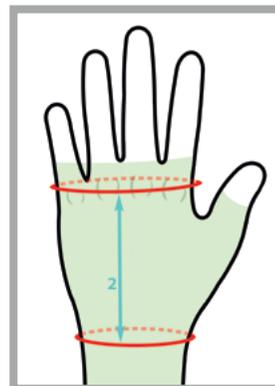


2. Handlänge

Hier wird auf Höhe der Mitte der Fingergrundgelenke bis zum Handgelenk gemessen.

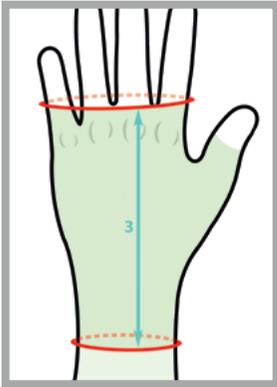


3. Gesamtlänge

Abschluss distal-Abschluss proximal
Dieses Längenmaß bezieht sich beim normal langen Handschuh auf den distalen Abschluss bis zum proximalen Abschluss hinter dem Handgelenk (Umfangmaße Position 1 – 5).

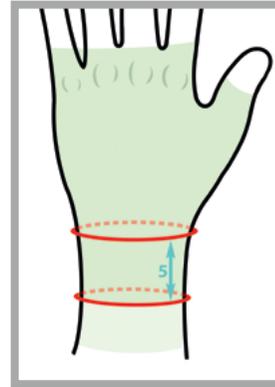


5. Schaftlänge Handgelenk

Dieses Längenmaß wird vom Handgelenk bis zur gewünschten proximalen Länge des Handschuhs gemessen. (Von Umfangmaß Position 4 – 5)

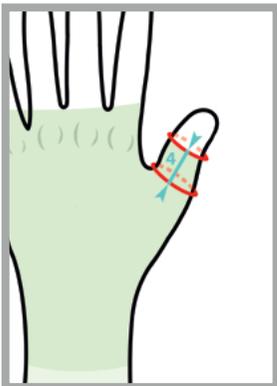

4. Daumenlänge

Hier wird vom Daumenabschluss distal bis zum Daumengrundgelenk gemessen.

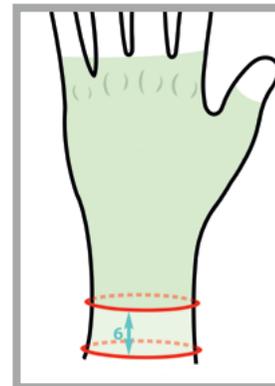

6. Unterarm Schaftlänge

Dieses Längenmaß wird nur benötigt, wenn die gewünschte Schaftlänge länger als das Handgelenk-Abschlussmaß (Position 5) sein soll (z. B. Mitte Unterarm). Hier wird dann die zusätzliche Länge vom Handgelenk-Abschluss Umfangmaß bis zur gewünschten proximalen Länge gemessen.



Bein-Sleeve mit Naht in Kontrastfarbe, Haftband am oberen Abschluss und offenem Saum.



Flexible Naht am oberen Abschluss




Offener Saum
(Empfohlen für Orthesenträger)



Silikonfreies transparentes Haftband für oberen Abschluss und Saum



Arm-Sleeve mit Naht passend zum Design

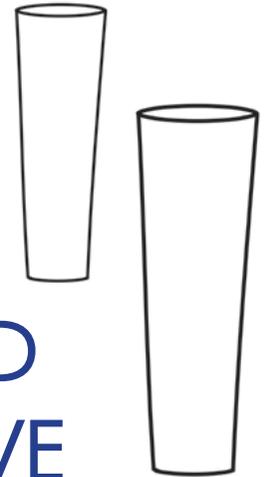

ARM- UND BEINSLEEVE

Neu im Programm unserer BODYGUIDE®-Serie sind die Arm- und Beinsleeves, die sowohl einzeln als auch in Verbindung mit einer Rumpfvorsorgung eingesetzt werden können. Wie auch bei den abnehmbaren Ärmeln und Handschuhen können die Sleeves mit einem speziellen Haftband am oberen und unteren Abschluss bestellt werden.

Des Weiteren bieten wir unterschiedliche funktionsunterstützende Korrekturzüge an, die fest in die Vorsorgung eingearbeitet werden. Hierbei haben Sie beispielweise die Möglichkeit, über einen gelenkübergreifenden Korrekturzug Einfluss auf die Streckung oder auch Rotation der betroffenen Extremität zu nehmen.


! Bitte nutzen Sie unsere Maßblätter als Kopiervorlage.

Für eine Bestellung bitte jeweils Maßblatt 1 für die Maßangaben sowie Kontaktdaten und Maßblatt 2 für die gewünschte Ausführung ausfüllen.

MASSBLATT 1 ARM-SLEEVE



- Rechts
- Links

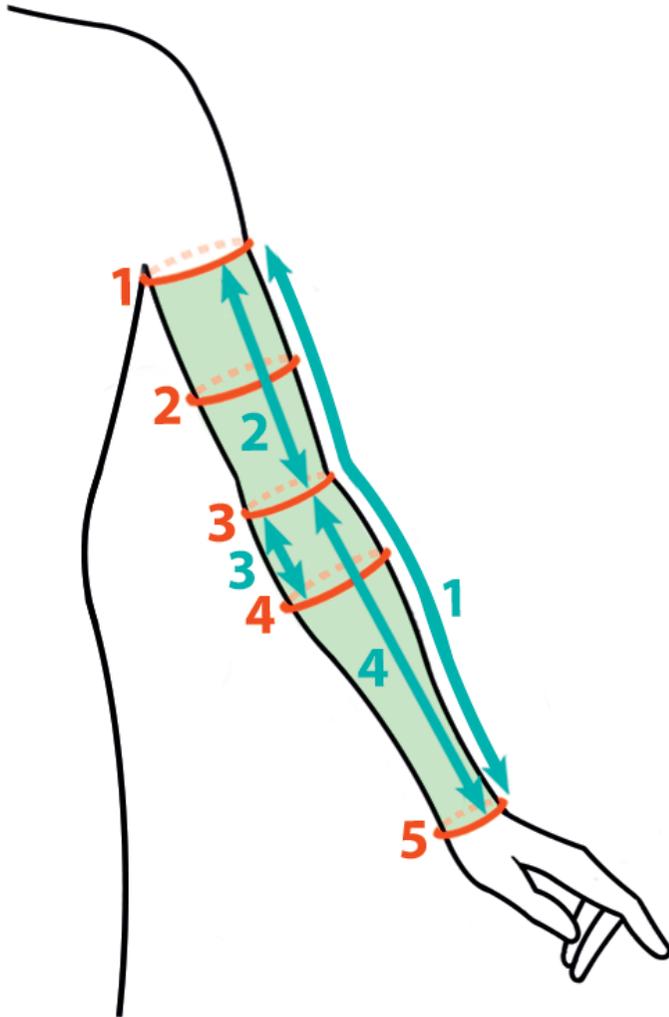

1. Umfang oberer Abschluss.....
2. Umfang Bizeps.....
3. Umfang Ellenbogen.....
4. Unterarmumfang.....
5. Umfang Handgelenk.....

Rechts	Links

Umfangsmasse

1. Gesamtlänge.....
2. Oberarmlänge.....
3. Ellenbogen bis Unterarmmuskel.....
4. Ellenbogen bis unterer Abschluss.....

Rechts	Links

Längenmaße

KONTAKTDATEN		<input type="checkbox"/> ANGEBOT	<input type="checkbox"/> BESTELLUNG
Kundenr.:	Kommission:		
Anschrift:	Alter:	<input type="checkbox"/> Männlich	<input type="checkbox"/> Weiblich
	Körpergröße:		
	Diagnose:		
Telefon:	Ansprechpartner:		
Datum:	Unterschrift:		

1. Stoff: (Design bitte ankreuzen)

2. Ausführung:

- 1-lagig
- 2-lagig

3. Haftband:

- Oberer Abschluss
- Unterer Abschluss

4. Verschluss:

- Reißverschluss kurz
- Klettverschluss


Passend zum Design

Kontrastfarbe:

- | | | | | | |
|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Schwarz | <input type="checkbox"/> Weiß | <input type="checkbox"/> Grau | <input type="checkbox"/> Blau | <input type="checkbox"/> Türkis | <input type="checkbox"/> Grün |
| <input type="checkbox"/> Gelb | <input type="checkbox"/> Orange | <input type="checkbox"/> Rot | <input type="checkbox"/> Pink | <input type="checkbox"/> Rosé | |



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Black



White




Leaf



Flash




Fire

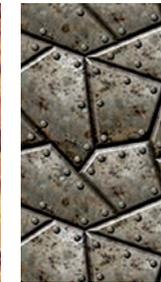

Metal




Rose

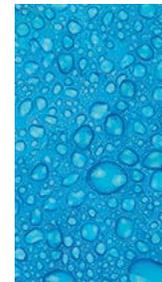

Rain




Zoo

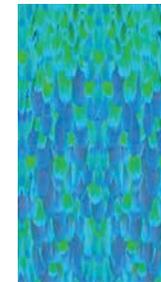

Wings



Wall

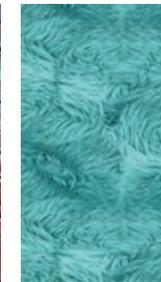

Fur



Silver



Kilt



Pirates



Unicorn




Splash Pink



Flowers

SKIZZENBLATT ARM-SLEEVE

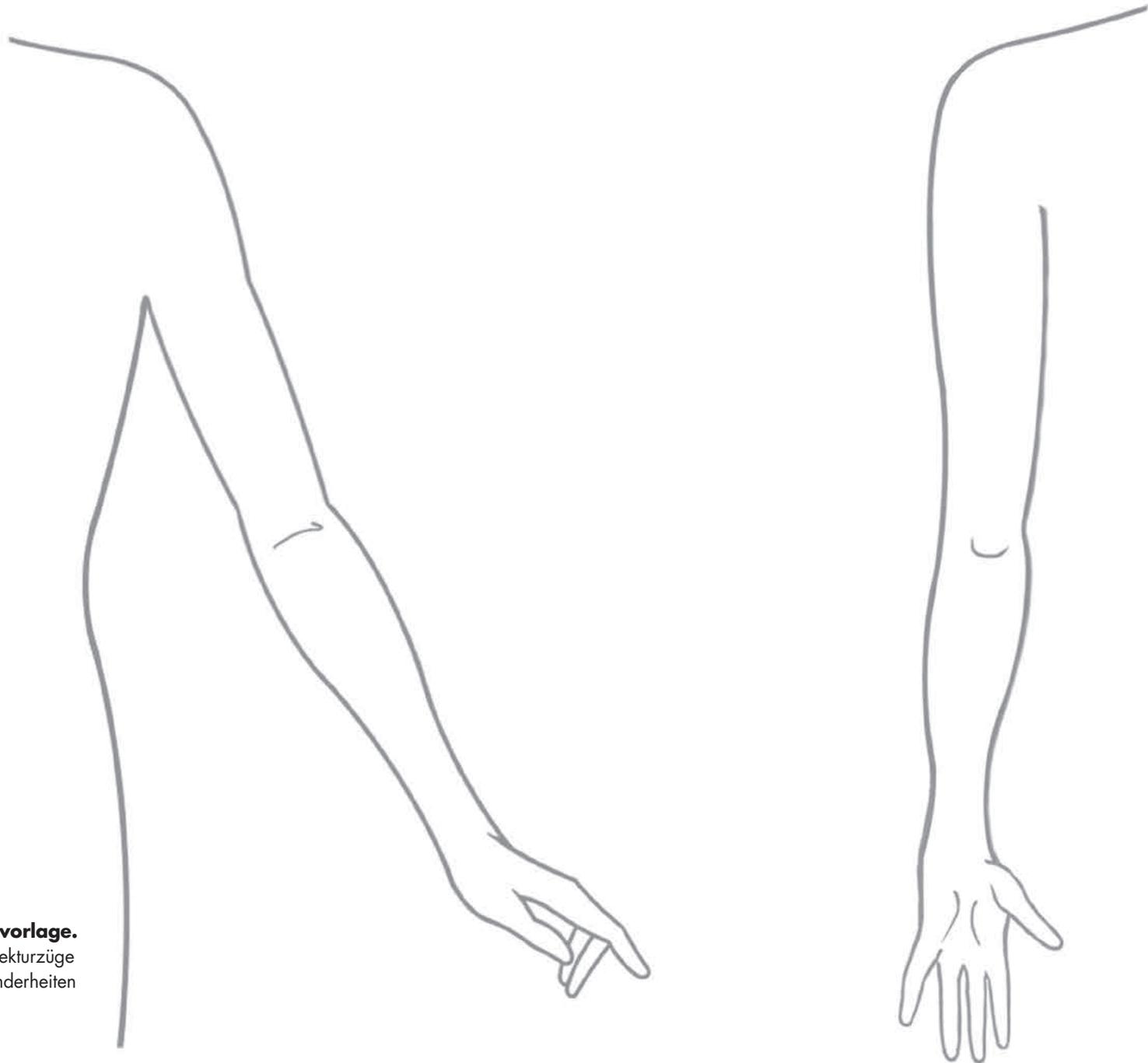

! Bitte nutzen Sie unsere
Skizzenblätter als Kopiervorlage.


Für gewünschte Modifikationen, Korrekturzüge
oder um Haltungs- und -Körper Besonderheiten
zu skizzieren.

MASSANLEITUNG


für **BODYGUIDE**® Arm-Sleeve

Alle Maße sollten glatt am Körper, also nicht zu stramm und nicht zu locker gemessen werden. Um genaue Längenmaße zu erreichen, ist es sinnvoll bei allen Umfangsmaßen eine kleine Linie mit einem abwaschbaren, hautfreundlichen Stift auf dem Körper zu markieren.

Die Umfangsmaße sind auf den Maßblättern und in der Anleitung **rot** markiert, die Längenmaße **türkis**. Alle **dunkelblau** markierten Positionen sind Hilfslinien.

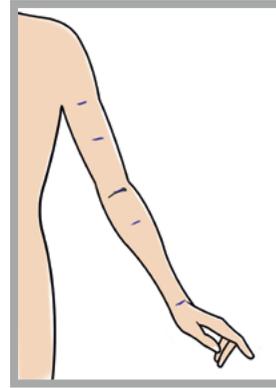


Als erstes sollte die Gesamtlänge des Armsleeves festgelegt werden und auf dem Arm markiert werden. Danach werden alle dazwischen liegenden, benötigten Umfangsmaße ermittelt und ebenfalls markiert. Liegt ein Umfangsmaß des Maßblattes außerhalb des späteren Sleeves, muss es selbstverständlich nicht genommen werden.

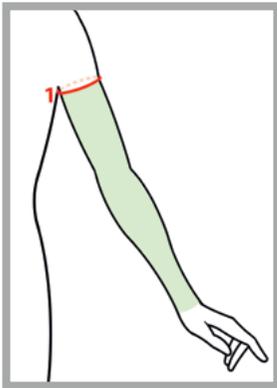


1. Umfang oberer Abschluss

Dieses Umfangsmaß liegt normalerweise im Bereich des Oberarms und wird an der zuvor markierten Position gemessen.

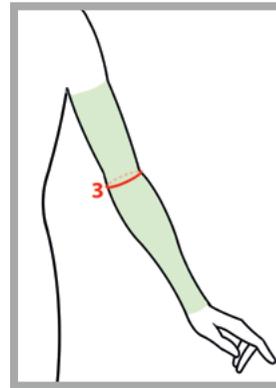


3. Umfang Ellenbogen

Beim Messen des Ellenbogenumfangs sollte der Ober- und Unterarm im rechten Winkel gebeugt werden. Dann wird in der Armbeuge über die stärkste Stelle des Ellenbogens Maß genommen.

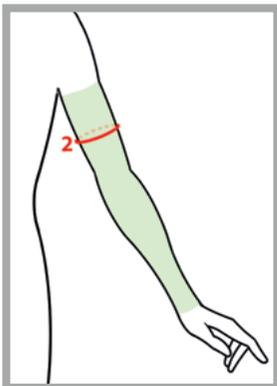


2. Umfang Bizeps

Hier wird auf Höhe des größten Umfangs des Bizeps gemessen.

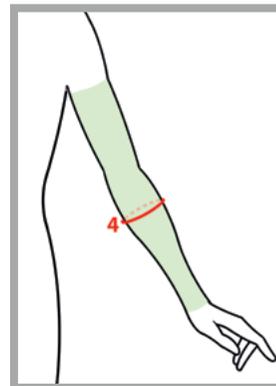


4. Unterarmumfang

Der Umfang des Unterarms wird auf der Höhe der stärksten Stelle des Unterarmmuskels gemessen.

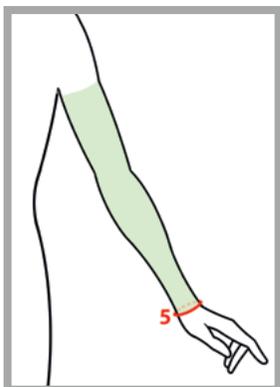


5. Umfang Handgelenk unterer Abschluss

Beim Handgelenksumfang wird über der Handwurzel gemessen. Er bildet gleichzeitig auch das untere Abschlussmaß. Falls ein kürzerer Sleeve gewünscht ist, muss das abweichende Maß genommen werden.

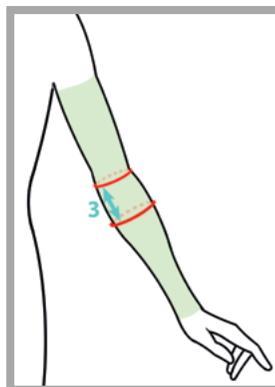


3. Ellenbogen bis Unterarmmuskel

Bei diesem Längenmaß wird von der Armbeuge Ellenbogen ab bis zur zuvor markierten Stelle Unterarmmuskel gemessen.

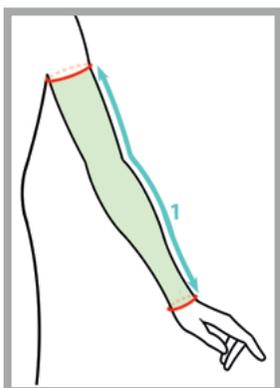


1. Gesamtlänge

Hier wird entlang der Armform, vom zuvor markierten oberen Abschluss bis zum unteren Abschluss gemessen.

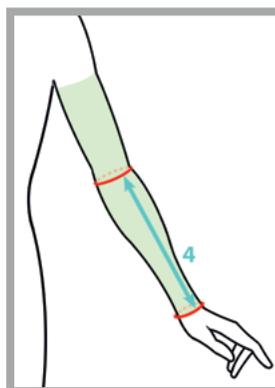

4. Ellenbogen bis Handgelenk unterer Abschluss

Hier wird von der Armbeuge Ellenbogen bis zum unteren Ärmelabschluss bzw. Handgelenk gemessen.

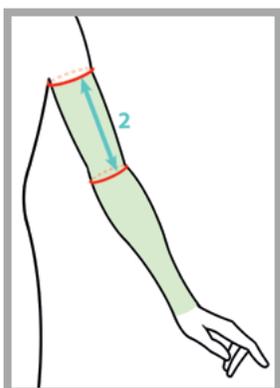


2. Oberarmlänge

Dieses Maß wird wieder entlang der Armform vom oberen Abschluss, bis zur Armbeuge gemessen.

MASSBLATT 1 BEIN-SLEEVE



- Rechts
- Links

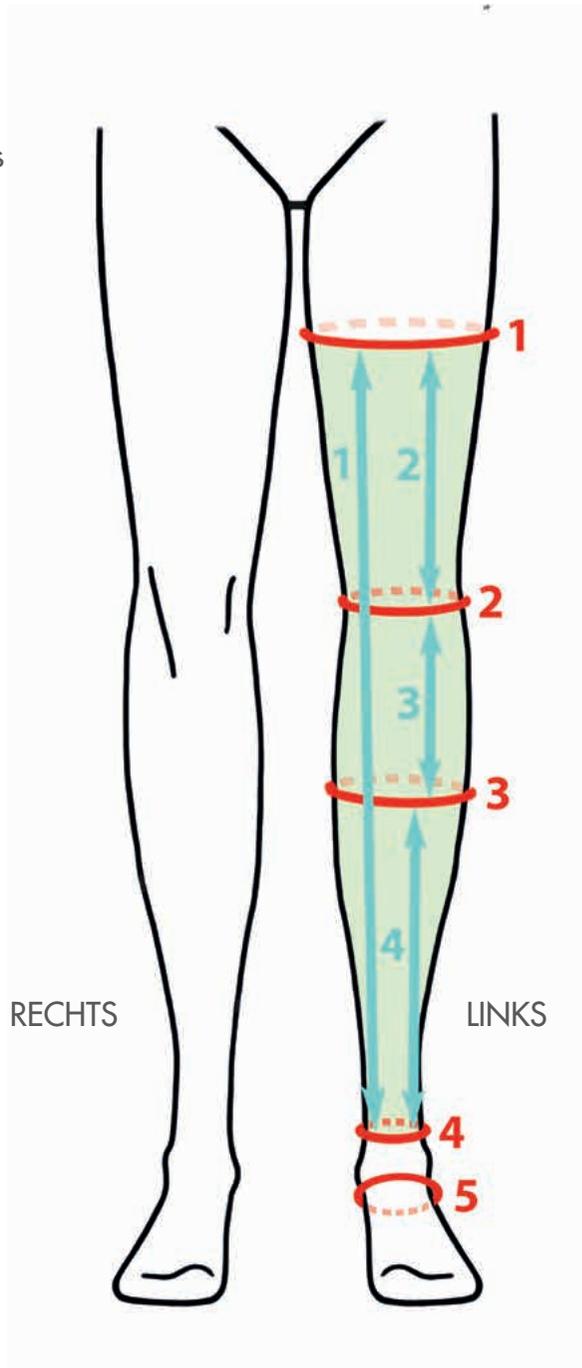

1. Oberer Abschluss Umfang.....
2. Knieumfang.....
3. Wadenumfang.....
4. Fesselumfang.....
5. Ristumfang.....

Rechts	Links

Umfangmaße

1. Gesamtlänge.....
2. Oberer Abschluss - Knie.....
3. Knie - Wade.....
4. Wade - unterer Abschluss.....

Rechts	Links

Längenmaße

KONTAKTDATEN	<input type="checkbox"/> ANGEBOT <input type="checkbox"/> BESTELLUNG
Kundennr.:	Kommission:
Anschrift:	Alter: <input type="checkbox"/> Männlich <input type="checkbox"/> Weiblich
	Körpergröße:
	Diagnose:
Telefon:	Ansprechpartner:
Datum:	Unterschrift:

1. Stoff: (Design bitte ankreuzen)

2. Ausführung:

- 1-lagig
- 2-lagig

3. Haftband:

- Oberer Abschluss
- Unterer Abschluss

4. Verschluss:

- Reißverschluss kurz
- Klettverschluss


Passend zum Design

Kontrastfarbe:

- | | | | | | |
|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Schwarz | <input type="checkbox"/> Weiß | <input type="checkbox"/> Grau | <input type="checkbox"/> Blau | <input type="checkbox"/> Türkis | <input type="checkbox"/> Grün |
| <input type="checkbox"/> Gelb | <input type="checkbox"/> Orange | <input type="checkbox"/> Rot | <input type="checkbox"/> Pink | <input type="checkbox"/> Rosé | |



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Black



White



Leaf



Flash




Fire



Metal




Rose

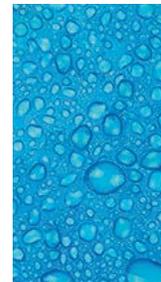

Rain



Zoo

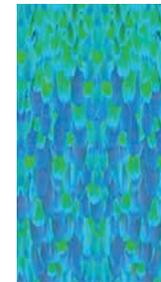

Wings



Wall



Fur



Silver



Kilt



Pirates



Unicorn





Splash Pink



Flowers

SKIZZENBLATT BEIN-SLEEVE

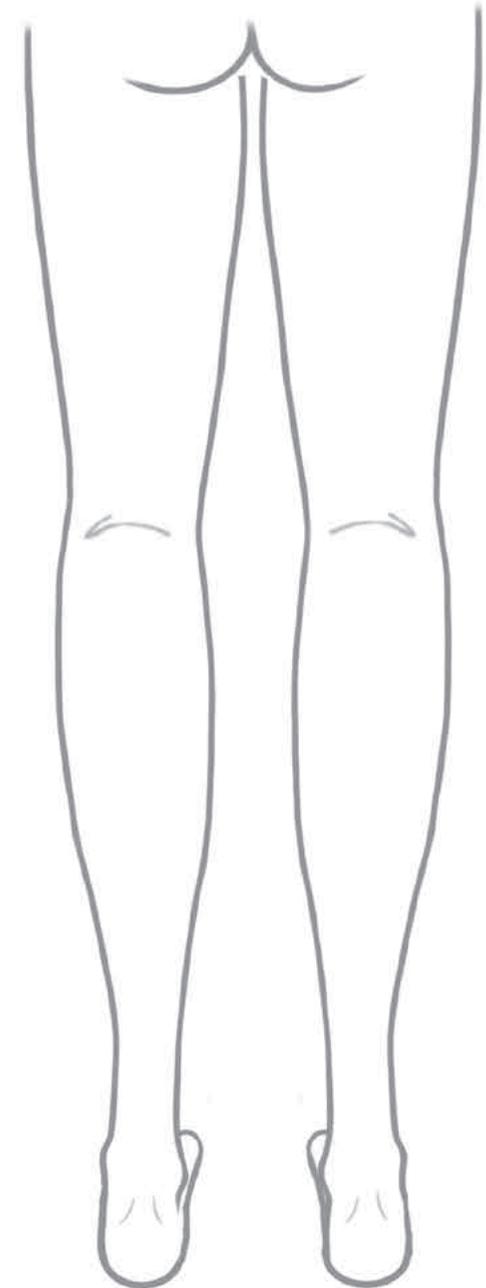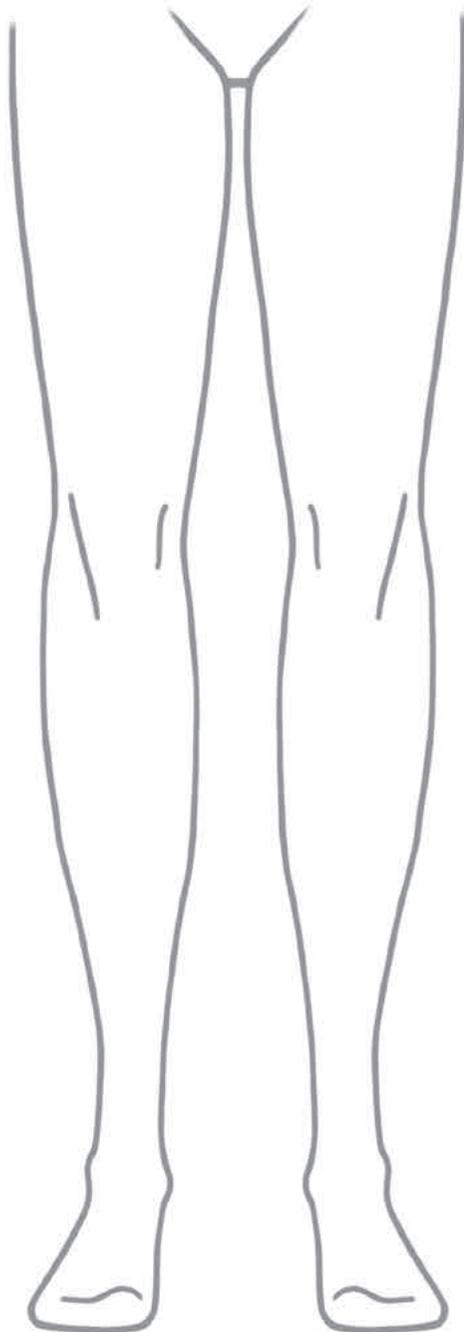


! Bitte nutzen Sie unsere
Skizzenblätter als Kopiervorlage.
Für gewünschte Modifikationen, Korrekturzüge
oder um Haltungs- und -Körper Besonderheiten
zu skizzieren.

MASSANLEITUNG


für BODYGUIDE® Bein-Sleeve

Alle Maße sollten glatt am Körper, also nicht zu stramm und nicht zu locker gemessen werden. Um genaue Längenmaße zu erreichen, ist es sinnvoll bei allen Umfangsmaßen eine kleine Linie mit einem abwaschbaren, hautfreundlichen Stift auf dem Körper zu markieren.

Die Umfangsmaße sind auf den Maßblättern und in der Anleitung **rot** markiert, die Längenmaße **türkis**. Alle **dunkelblau** markierten Positionen sind Hilfslinien.

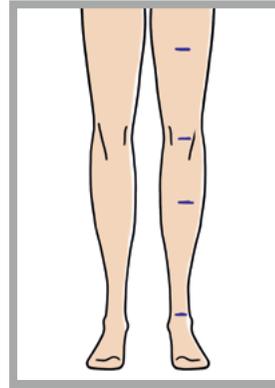


Als erstes sollte die Gesamtlänge des Beinsleeves festgelegt werden und auf dem Bein markiert werden. Danach werden alle dazwischen liegenden, benötigten Umfangsmaße ermittelt und ebenfalls markiert. Liegt ein Umfangsmaß des Maßblattes außerhalb des späteren Sleeves, muss es selbstverständlich nicht genommen werden.

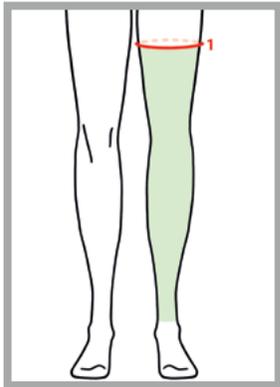


1. Oberer Abschluss

Der obere Abschluss liegt üblicherweise im Bereich des Oberschenkels und wird auf Höhe der zuvor festgelegten Position waagrecht gemessen.

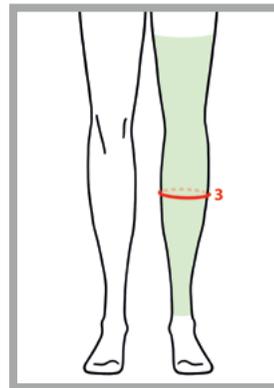


3. Wadenumfang

Der Wadenumfang wird waagrecht, auf Höhe der stärksten Stelle der Wade gemessen. Sie befindet sich meist im oberen Bereich der Wade.

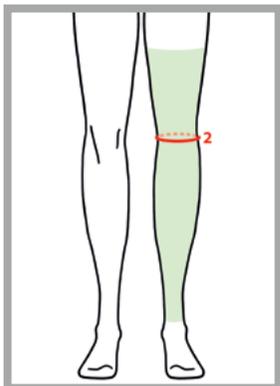


2. Knie

Den Knieumfang misst man waagrecht auf Mitte der Kniescheibe, bzw. der stärksten Stelle des Knies.

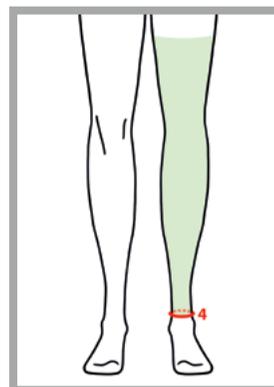


4. Unterer Abschluss

Der Umfang des unteren Abschlusses wird an der zuvor markierten Position gemessen. Er liegt meist im Bereich der Fessel.

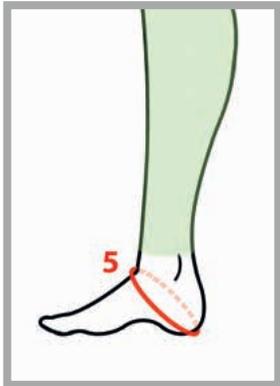


5. Ristumfang

Dieser Umfang wird diagonal über die Fersenrundung und dem Rist gemessen.

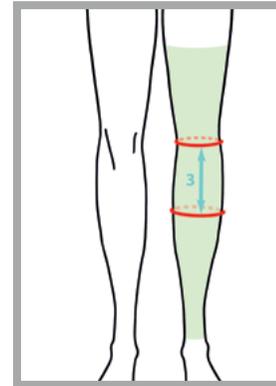


3. Knie - Wade

Hier wird die Strecke zwischen den zuvor markierten Positionen von Mitte Knie Scheibe bis zum stärksten Umfang der Wade gemessen.

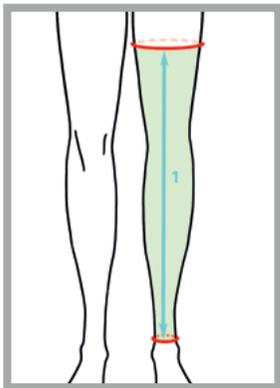


1. Gesamtlänge

Hier wird vom oberen Abschluss entlang der seitlichen Bein form bis zum unteren Abschluss gemessen

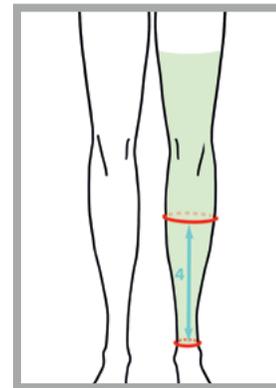

4. Wade - unterer Abschluss

Dieses Längenmaß wird je nach gewünschter Länge des Sleeves und der stärksten Stelle der Wade ab, bis zur gewünschten Länge des Sleeves gemessen. Dieser liegt meist im Bereich Fessel.

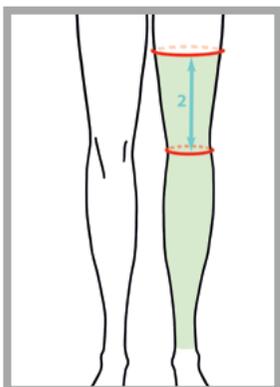

2. Oberer Abschluss - Knie

Dieses Längenmaß wird wie bei der Gesamtlänge vom oberen Abschluss entlang der seitlichen Bein form bis zur Mitte der Knie Scheibe gemessen.



Heinrich Caroli GmbH

Eichrodstraße 13
D-77933 Lahr/Schwarzwald

Telefon: +49 (0) 78 21 | 93 99 33
Telefax: +49 (0) 78 21 | 93 99 34
info@caroli.de

www.caroli.de