


Wartungsplan GENU XO 18

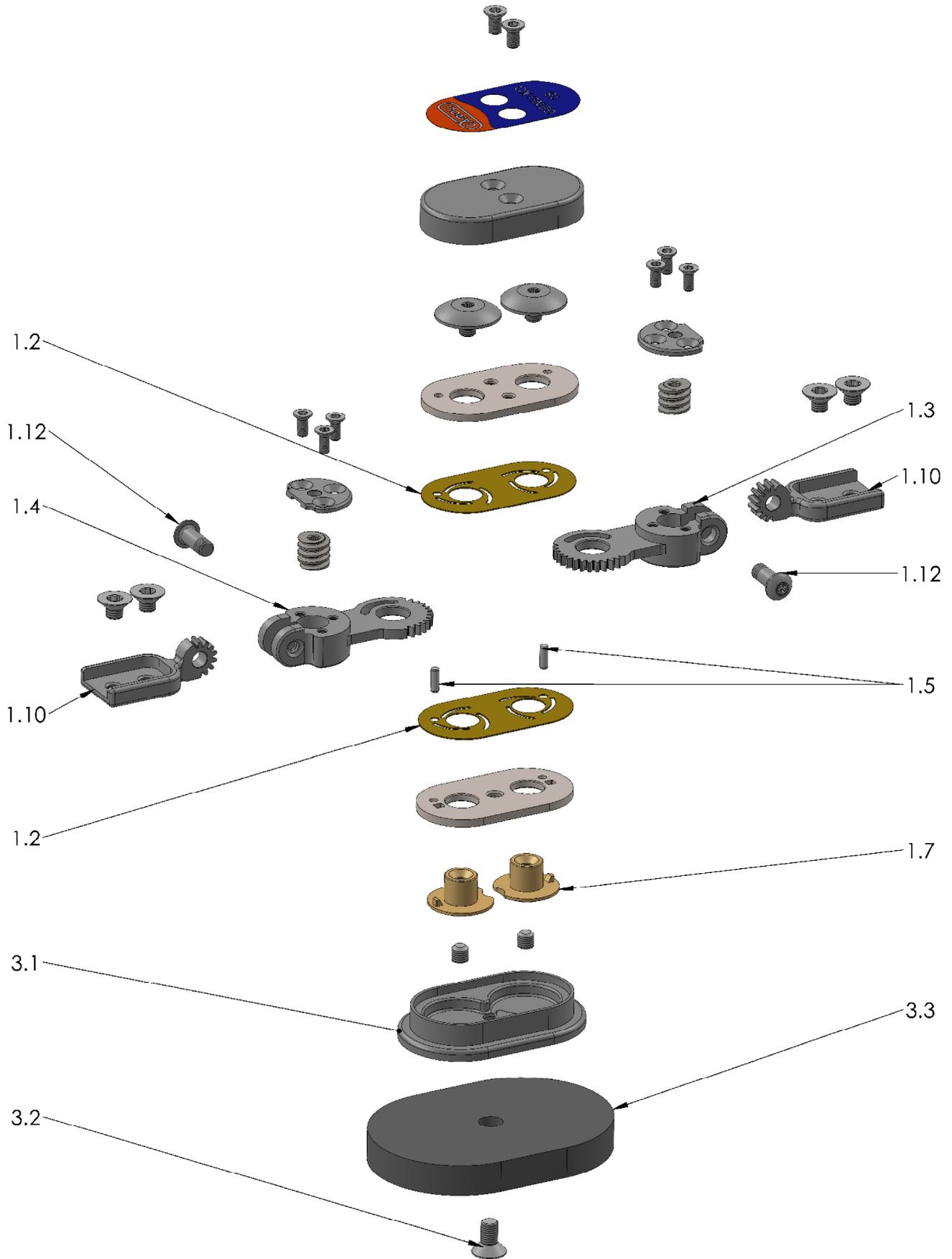

Wartungsplan GENU XO 18

Die GENU XO Orthesen-Kniegelenke unterliegen keiner vorgegebenen, zeitlich begrenzten Nutzungsdauer. Verschleißbedingt kann sowohl der Austausch diverser Gelenkkomponenten als auch der Austausch des kompletten Gelenkes erforderlich sein, um die Sicherheit des Patienten gewährleisten zu können. Beachten Sie hierzu die aufgeführten Informationen zur Wartung.

Bitte führen Sie bei jeder Wartung als erstes eine Funktionsprüfung des Gelenkes durch.

Hierbei sollte sich das Gelenk leichtgängig und spielfrei bewegen lassen.

Abweichungen können neben dem Verschleiß diverser Gelenkkomponenten auch auf losgelöste Schrauben oder einer Abweichung der Einstellung des Achsspiels zurückzuführen sein.

Weitere Informationen zur Schraubensicherung/Einstellung Achsspiel finden Sie in der zugehörigen Gebrauchsanweisung.

Position	Bezeichnung	Empfohlener Wartungsintervall	Sichtbare Merkmale (Verschleiß/Mangel)	Maßnahme	Artikel-Nr.
1.2	Gleitplatte	alle 6 Monate	Einkerbungen in den Laufflächen	ggf. Austausch	903263
1.3	Gehäuse mit Verzahnung (Rechts)	alle 6 Monate	Verschleiß an den Zähnen	ggf. Austausch	903270
1.4	Gehäuse mit Verzahnung (links)	alle 6 Monate	Verschleiß an den Zähnen	ggf. Austausch	903271
1.5	Zylinderstifte	alle 6 Monate	Verformung	ggf. Austausch	902166
1.7	Achse	alle 6 Monate	Einkerbungen in den Laufflächen	ggf. Austausch	903334
1.8	Schnecke	alle 6 Monate	Verschleiß an der Lauffläche/Flanke	ggf. Austausch	901190
1.10	Zahnsegmentschenkel	alle 6 Monate	Verschleiß an den Zähnen	ggf. Austausch	903268
1.12	Ansatzschraube	alle 6 Monate		ggf. Austausch	903390
3.1	Auflage Schaumstoffpelotte	-	-	-	903698
3.2	Senkschraube	-	-	-	902161
3.3	Schaumstoffpelotte	alle 6 Monate	Eingedrückte Pelotte	ggf. Austausch	903693